

Finalidade: Cadeira de duche permite que pessoas com mobilidade reduzida possam tomar banho em condições ideais. A posição reclinável é ajustável na parte de trás. Pode ser utilizado na versão chuveiro ou sanita com o bacio ou posicionado acima da sanita padrão.

Características:

Apoios de braços eleváveis e guarda costas almofadadas e um apoio de cabeça multi-posições.

Inclinação da cadeira: 97° a 125°

Peso: 14,5 kg

Peso máximo do utente: 130 kg

Dimensões:

Gerais: L 55,5 x prof 101 x A 118 a 123 cm

Assento: L 43,5 x prof 43,5 x A 55,5 a 60,6 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822007

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpe regularmente com detergente neutro e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos solventes. Seque com pano macio limpo e seco. Lubrifique as rodas com um pouco de óleo se chiarem.

Instruções de utilização:

1. Para ajustar a distância e a altura do encosto da cabeça, desbloqueie a roda do triângulo, ajuste-a e fixe-a novamente utilizando a roda.
2. Para inclinar a cadeira, primeiro bloqueie os travões em cada roda para garantir a segurança do paciente. Pressione a alavanca de inclinação para inclinar a cadeira para trás.

Imagens do Artigo:

