

CADEIRA WC E DE BANHO 822007 MANUAL DE INSTRUÇÕES



Dimensões totais: Largura 55,5 x Profundidade 101 cm

Altura ajustável : 118 a 123 cm

Dimensão do assento: Largura 43,5 x profundidade 43,5 x altura 55,5 a 60,6 cm

Carga máxima: 136 kg


Peso da estrutura de alumínio anticorrosão: 14,5 kg

Diâmetro da roda: 12,5 cm

Aviso Geral de Segurança

Certifique-se de que estas instruções são totalmente lidas e compreendidas. O não cumprimento deste manual pode resultar em danos ao utilizador. Armazenar em local seguro para uso futuro.

1. DESCRIÇÃO

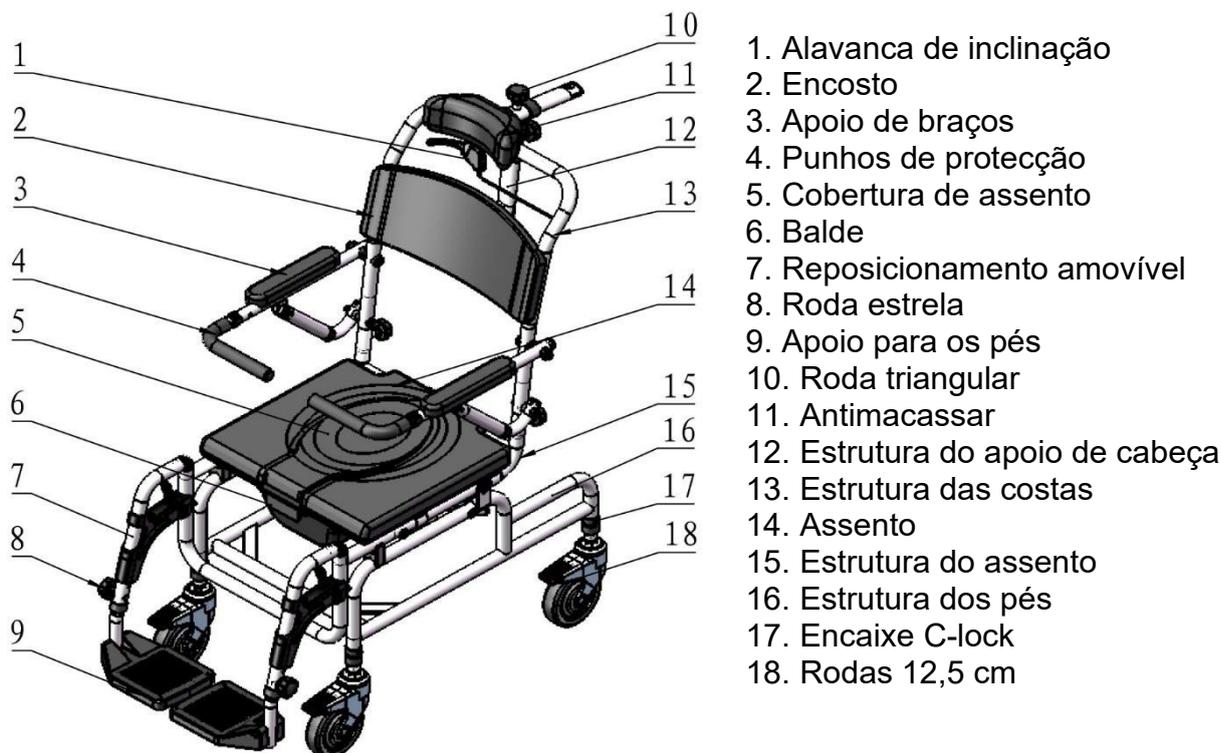

2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA - VERIFICAÇÕES PRÉVIAS

Certifique-se de que a Cadeira WC e Banho e está desdobrada e trancada antes de ser utilizada.

Certifique-se de que todas as peças estão trancadas com segurança e que as peças removíveis estão em boas condições de funcionamento.

3. MONTAGEM

- a) Inserir a moldura do encosto na moldura do assento, como mostra a imagem 1. Uma vez correctamente no lugar, bloquear com as rodas estrela.
- b) Instale os quatro rodízios e fixe-os com os cliques C (ver imagem 2).
- c) Instalar os apoios para os pés amovíveis na estrutura do assento (imagem 3)
- d) Insira as pegas protetoras nos tubos do apoio de braços (imagem 4)
- e) Inserir a armação do apoio de cabeça na armação do banco e trancá-la com o botão triangular (imagem 5).

f) Instalar a placa frontal na moldura oval da placa frontal e fixá-la com o botão triangular (imagem 6)



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6

4. CONTROLOS

Antes de utilizar a cadeira de WC e de Banho, certifique-se de:

- Que a cadeira está devidamente montada
- Que todos os componentes da cadeira estão devidamente fixados
- Que a cadeira não tem defeitos de aparência

5. UTILIZAÇÃO

- a) Para ajustar a distância e a altura do apoio de cabeça, desbloquear o botão triangular, ajustar e depois voltar a fixar com o botão.
- b) Para inclinar a cadeira para trás:
 - Primeiro, bloquear todos os travões em cada um dos rodízios para garantir que a cadeira de banho se mantém no lugar.
 - Em seguida, pressionar a alavanca de inclinação para inclinar a cadeira para trás. A cadeira de WC e Banho inclina-se de 97° a 125°.
- c) Ao instalar o utilizador, levantar as pegas de protecção e depois devolvê-las à sua posição original.

6. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Cuidados

- ✓ Limpe a cadeira regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize abrasivos, detergentes ou solventes.
- ✓ Seque com um pano macio limpo e seco.
- ✓ Certifique-se de que não há acumulação de sujidade ou detritos à volta do eixo, dos travões ou das rodas.
- ✓ Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- ✓ Lubrifique as rodas com um pouco de óleo se elas chiarem.

Manutenção

- ✓ Verifique regularmente se todos os parafusos estão devidamente fixados e apertados.
- ✓ Verifique se os travões estão a funcionar corretamente antes de cada utilização.
- ✓ Em caso de mau funcionamento, não repare a cadeira sozinho. Consulte um revendedor autorizado.