

4 EM 1 ENCARTÁVEL

Finalidade: Permitir uma maior segurança e estabilidade, a pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência, durante o duche e a utilização da sanita;

Características: Estrutura de Alumínio anodizado (regulável em altura), assento em PVC e ponteiros em Borracha antiderrapante;

Funções: Alteador de sanita, suporte para sanita, confortável e assento para duche.

Peso máximo – 130 kg

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP781

Marca: Mopedia

Dimensões: 64 – 74 x 46 – 56cm

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Instruções de Utilização: Os dispositivos da linha MOPEDIA by Moretti, na altura da sua colocação no mercado, são cuidadosamente examinados e marcados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos. Para limpar utilize água morna e um sabão neutro. Seque com um pano.

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies metálicas;

Instruções de Utilização: Ao sentar-se, distribua sempre o peso por todo o assento. Não se sente carregando o peso só de um lado. Para se levantar e manter o equilíbrio, apoie-se sempre em ambos os apoios de braços.

No caso de utilização da cadeira por pessoas com deficiências motoras particulares, ajudá-las sempre a sentar e levantar.

Imagens do Artigo:

