

Finalidade: O nosso saco de água quente garante o bem-estar instantâneo e aquece a cama. O saco é indicado para conter água quente em segurança, para aplicar em pontos doridos no seu corpo e transmitir-lhe uma rápida sensação de alívio. É fácil de usar e permite efetuar uma terapia de calor eficaz durante um longo período de tempo. Efeitos: Aliviam as dores resultantes de contraturas musculares, cervicais, artrite, câibras ou dores menstruais. Uma vez aplicados sobre a parte dorida, relaxam e aliviam a tensão nos seus tecidos de uma forma natural. Um remédio tradicional, simples e eficaz.

Características: O saco consiste num depósito de borracha natural com uma capacidade de 2 litros. Quanto ao seu Revestimento/Capa, é um tecido bastante macio e confortável:
855146.N: Tecido de Microfibra
855147.N: Tecido de Microfibra
855149: Tecido de Malha

Dimensões: 33 x 20 cm.

Cor:

Padrão Arco-íris – 855146.N

Padrão – 855147.N

Padrão Renas – 855149

Modelo:

855146.N - Padrão Arco-íris

855147.N - Padrão

855149 - Padrão Renas

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Marca: Identités

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpar com água e sabão, não utilize objetos abrasivos ou benzinas. O seu revestimento é feito de tecido lavável, para uma suavidade e uma conveniência ainda maiores. Não expor a temperaturas elevadas nem ao sol.

Instruções de utilização: Abra a rosca de vedação, segure a bolsa pelo gargalo, em posição vertical, e despeje a água quente no seu interior, cuidadosamente para não se queimar com as bolhas de ar que podem formar-se. Não encha mais do que 2/3 da capacidade total. Retire o ar de dentro do saco, baixando-a sobre uma superfície plana até que a água apareça na abertura. Tape o saco, girando a rosca de vedação, certificando-se da posição correta. Verifique se o bocal está bem fixado e a rosca bem fechada para evitar fugas.

Imagens do Artigo:

