

**Finalidade:**

Tala de mão com controlo posicional, fácil ajuste à anatomia do paciente e cintas que permitem diversos posicionamentos.

Imobilização, alinhamento funcional das articulações dos dedos, mão e pulso. Controlo da espasticidade involuntária, manutenção de posturas funcionais.

Indicado para lesões neurológicas periféricas e centrais, posicionamento pós-operatório de dedos, mão e pulso. Síndrome do Túnel Cárpico.

**Características:**

Adaptável: Fácil ajuste à anatomia do paciente.

Eficiente: Conjunto de cintas de retenção acolchoadas que permitem diferentes posicionamentos.

Confortável: acolchoamento interno HD com o máximo de conforto e respirabilidade.

Núcleo maleável de alumínio.

Bilateral

Cintas de retenção para dedos, mãos, pulso, antebraço e separador digital.

Prende com tiras de velcro.

**Dimensões:** Tamanhos: largura palmar em cm

S : 5-7

M : 7-9

L : 9-11

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MN300

**Marca:** EMO

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

O artigo deve ser adaptado pelo protésico ou pelo médico da forma individual para cada paciente. A escolha do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento.

A Ortótese é de fácil colocação.

**Imagens do Artigo:**