

Finalidade:

Ortótese de cinta sacroilíaca de tecido elástico para proporcionar um maior apoio durante a gravidez.

Indicado para dor lombar, sacroilíaca ou pélvica e desconforto durante a gravidez.

Alivia as dores lombares e pélvicas durante a gravidez. Proporciona apoio e suporte constante à barriga. Eleva o abdómen, melhorando a postura sacroilíaca. Fortalece a zona abdominal inferior. Não comprime os órgãos abdominais e não restringe a mobilidade.

Características:

Feita em tecido elástico respirável. Inclui cinta elástica amovível para aumentar a sua função de suporte, contem silicone para evitar a deslocação de posição.

Fixação e ajuste por velcro.

Largura: 8 cm;

Comprimento: 100cm;

75% Poliamida; 22,6% Elastano; 2,4% Silicone

Tamanho: Único

Cor: Cinza ou Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: FJ270

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar o artigo.

Instruções de utilização:

Colocar a cinta sobre a zona pélvica. Envolve o abdómen com a cinta, apertando as faixas de velcro até obter o grau de apoio pretendido. A zona frontal deve ser posicionada abaixo do abdómen para que cumpra a sua função de apoio.

Imagens do Artigo: