# EMO LUMBACK CINTA SACROLOMBAR FJ201 CINZA & GeriMais

#### Finalidade:

Ortótese Cinta Sacrolombar indicada para: Dores agudas e subagudas na zona lombar; Síndrome da faceta; protrusão do disco; hérnia de disco; espondilolistese — processos degenerativos; hipotonia muscular e reabilitação postural. Efeitos: Suporte; estabilização; descarga lombar: controlo da mobilidade por flexão-Extensão

#### Características:

Ortótese Cinta Sacrolombar feita com tecido elástico e altamente respirável. Peça sacrolombar Inelástica que distribui a descarga e dá apoio á área. Incorpora quatro cintas de aço adaptáveis. Fabricada sem costuras: evita sobrepressões e maximiza a leveza. Duas aberturas para uma fácil colocação. Almofada lombar incluída. Fixação por Micro-Velcro. Sem Latex: Hipoalergénico

Dimensões: S , M , L , XL , 2XL , 3XL S (79-85 cm), M (85-91 cm), L (91-99 cm), XL (99-107 cm), XXL (107-115 cm) 3XL (115-126 cm)

Cor: Cinza

Modelo: FJ201

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Marca: Lumback (EMO)

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:** Camino de La Pascualeta, 40 46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peca de vestuário.

## Instruções de utilização:

Colocar o cinto na área lombo-sacra na altura correta para uso. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdómen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

#### **Imagens do Artigo:**



