

**Finalidade:**

Cadeira móvel de banho e sanitária destinadas à utilização em interiores ao realizar as tarefas de higiene em pessoas com mobilidade reduzida. O produto pode ser utilizado em chuveiros, lavatórios ou sobre sanitas, bem como para transferências de e para a casa de banho. O produto destina-se à utilização em ambientes domésticos e instituições. O produto é adequado para utilização em áreas molhadas, mas não em piscinas ou ambientes corrosivos semelhantes. Destina-se a compensar vários tipos de lesões ou deficiências que limitem a mobilidade do utilizador. O produto destina-se a utilizadores adultos, geralmente pessoas com pelo menos 146 cm de altura e que pesem pelo menos 40 kg.

**Características:**

Costas, Apoio para os braços, Assento, Apoio de pés, rodas.

Superfícies lacadas – Revestimento de poliéster em pó.

Superfícies de aço não lacadas – Fe/Zn-Ni

Largura máxima: 55 cm;

Profundidade máxima: 56,5 cm;

Altura máxima: 107cm;

Largura de assento: 48cm;

Peso da cadeira: 14,5 kg;

Peso máximo do utilizador: 130kg;

**Marca:** Clean

**Modelo:** AD828

**Caixa:** 1 Unidade;

**Cor:** Branco/Verde aqua

**N.º de Série e Lote:** Descritos na Etiqueta existente no artigo;

**Fabricante:** ETAC

**Morada do fabricante:** Etac Supply Center AB  
Långgatan 12, SE-334 33 Anderstorp

**Distribuidor:** Gerimais;

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Armazenamento e manutenção:** Limpe o produto utilizando um agente normal não abrasivo (valor de pH entre 5 e 9). Lave e seque. Desinfete o produto com uma solução desinfetante a 70%. O produto não requer qualquer outro tipo de manutenção. O produto e os respetivos acessórios podem ser limpos em segurança a 85°C durante 3 minutos (salvo indicação em contrário).

**Instruções de Utilização:**

Antes de efetuar transferências para e a partir da cadeira Clean, é importante assegurar que as rodas estão bloqueadas e apontadas para fora. Passar uma soleira: Apenas com a cadeira, faça pressão para baixo na fixação das rodas. Com o ocupante, puxe a cadeira para trás. Em posição imóvel: bloqueie sempre tantas rodas quanto possível, quando a cadeira é utilizada numa posição imóvel. As rodas viradas para fora melhoram a estabilidade da cadeira.

**Imagens do Artigo e Embalagem:**