

Finalidade:

Perneira indicada para: Rasgamento dos músculos da tíbia anterior e do gêmeo, Tensões musculares, dor aguda e crônica, Cãibras. Efeitos: Apoio e suporte, calor, terapêutico, compressão.

Características:

Feito em tecido térmico: suporte térmico, elástico e extremamente respirável.

Forma anatômica facilmente ajustável e adaptável

Cobre toda a área do gêmeo

Ajustável com fecho de velcro

Dimensões:

Altura

25 CM

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: RD521

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Colocar a perneira na área da perna inferior na altura correta para uso. Com a ajuda dos dedos, apertar e ajustar a perneira sobre a perna. Fechar a peça por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

Indicado para: Tensões musculares, dor aguda e crônica, cãibras.

Imagens do Artigo: