

Finalidade:

Banda para tornozelo Indicado para utilizar em casos de Apoio do tornozelo, gravação em oito, fascite plantar, pé aberto, apoio ao laxismo crónico, pacote de gel ou suporte de eléctrodo

Efeitos: Ligadura de apoio e compressão.

Características:

Ligadura elástica respirável de fixação por microvelcro. Sem látex.

Dimensões:

Comprimento 80 cm.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: STP080

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Colocar a banda no tornozelo na posição correta para seu uso, através de fitas em oito. Com a ajuda dos dedos , aperta e ajusta a peça sobre o tornozelo. Fechar a peça por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

