

Finalidade:

Lesões nos joelhos. Instabilidade do joelho. Lesão ligamentar do joelho. Reabilitação pós-traumática. Reabilitação pós-operatória. Ideal para uso profilático. Recomendado para desportos. Efeitos: Estabiliza a articulação do joelho. Controlo medio-lateral. Controlo antero-posterior. Controlo do grau de flexão-extensão da articulação: imobilização da articulação ou controlo da amplitude do movimento. Limita os possíveis movimentos patológicos.

Características:

Órtese estabilizadora do joelho. Junta monocêntrica ajustável e expansível: flexão-extensão controlada do joelho em diferentes ângulos. Sistema de fecho simples e rápido de 0º, 15º e 30º. Controlo da flexão de 0º a 120º em intervalos de 10º. Controlo de extensão de 0º a 90º em intervalos de 10º. Sistema de extensão telescópica da junta: altura mínima de 46 cm. Altura máxima 69 cm. Placas anti rotacionais laterais médias, Cintas de fixação (4) com sistema de fixação rápida e ajuste independente. Almofadas respiráveis, anti-derrapante. Abertura frontal completa.

Dimensões:

Alturas - Mínima: 46 cm. Máxima: 69 cm.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: IF020

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas umas às outras ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde ou ferro a roupa. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não expor diretamente a uma fonte de calor direto.

Instruções de utilização:

Abertura total da joelheira, cinta de velcro, as articulações são marcadas com "para cima" na extremidade na área da coxa. Colocar o utente deitado de costas com a perna entre as duas articulações. Ajuste do comprimento das duas articulações (corretamente) alinhado em relação ao eixo do membro inferior e no que diz respeito à articulação fisiológico). O comprimento das duas juntas devem ser o mesmo. Afrouxar a área de extremo das correias e aperte a fivela. Ajuste o comprimento das correias para o perímetro da perna do paciente. Se o comprimento das alças é excessiva remove tipo terminais velcro "Y", aparar o excesso e recolocar o terminal. Ajuste as correias e prenda com velcro.

Imagens do Artigo: