

REBATÍVEL

Finalidade:

Apoio/suporte de casa de banho rebatível permite-lhe posicionar um suporte elevável quando só estão disponíveis paredes de gesso cartonado para montagem no chão. O suporte é fixado na altura desejada na coluna. Equipado com um suporte de papel.

Confortável suporte de 32 mm de diâmetro.

Características:

Estrutura: aço

Altura da coluna: 110cm.

Suporte de fixação: 25 x 15,5cm.

Peso máximo autorizado: 100kg.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815120

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France -

www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpe regularmente, limpe com um pano macio e uma solução suave de detergente/desinfetante. Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Mantenha seco. Verifique periodicamente a estabilidade e a rigidez do produto e, se necessário, que os parafusos estão apertados e em bom estado. Se notar danos ou suspeitar de um defeito, não utilize o produto e contacte o seu fornecedor.

Instruções de utilização:

- Instale apenas o produto numa área onde a superfície de montagem e o suporte sejam estruturalmente saudáveis.
- Podem ser necessárias modificações de reforço da superfície de fixação.
- Verifique também o tipo de suporte em que pretende fixá-lo, por exemplo em tijolo, madeira ou betão. Verifique sempre se o tipo de bucha que vai utilizar é compatível com o suporte.
- Certifique-se de que, quando devidamente colocado, o carril pode ser levantado e abaixado sem interferências de outras instalações e móveis e de que a transferência pode ser efetuada com segurança.

Imagens do Artigo: