

## Finalidade:

Elevador de sanita concebido para aumentar a altura da sanita, com dois braços rebatíveis, facilita aqueles que têm dificuldade em sentar-se e levantar-se e promove a independência e o conforto do utilizador. Ao levantar o braço permite uma transferência lateral com facilidade e na posição normal, permitem que se apoie neles para se levantar. Indicado para: pessoas idosas, utilizadores de cadeiras de rodas, pessoas com mobilidade reduzida de lombar, joelho ou anca.

## Características:

Materiais: polietileno de alta densidade e alumínio.

Elevação da sanita: 12,5 cm

Peso: 2,6 Kg.

Peso máximo do utilizador: 130 Kg

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** 93/42 ECC

**Classificação:** Classe I

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Modelo:** 811129

**Marca:** Primo - King

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

## Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. A fim de garantir uma utilização segura e um padrão adequado de higiene, o utilizador deve realizar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

## Instruções de utilização:

Fixação firme na borda da sanita através de suportes traseiros ajustáveis e parafuso de bloqueio frontal em nylon.

Ligeira inclinação que reduz a flexão das articulações, a abertura frontal facilita a higiene pessoal. Para instruções de montagem verifique o manual que segue em anexo junto ao artigo.

## Imagens do Artigo:

