

**Finalidade:**

Tornozeleira de estabilização funcional. Estabiliza a articulação e limita a supinação ou inversão. Permite a flexão e extensão da articulação, mas limita os movimentos mediolaterais. Melhora a propriocepção. Apoio térmico: evita lesões, anti-alérgico, relaxante muscular, encurta o tempo de aquecimento. Elasticidade uniforme em todas as direções: melhor adaptação, ajuste e colocação. Compressão tridimensional: aumenta a proteção, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação de proprioceptividade.

**Características:**

Forro interior em 3D para um melhor conforto térmico. Encaixe perfeito por meio de lacagem. Incorpora duas tiras rígidas laterais que estabilizam a articulação em pronação e supinação. Termofabrico: suporte térmico, elástico e extremamente respirável. Certificado Oeko-Tex Standard 100: rótulo ecológico têxtil que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Tratamento antibacteriano Thermo-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor.

**Dimensões:**

S : 22-24 cm  
M : 24-26 cm  
L : 26-28 cm  
XL : 28-30 cm

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** TB510

**Marca:** Ottec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Forro interior em 3D para um melhor conforto térmico. Encaixe perfeito com cordão de tracção. Incorpora duas cintas não elásticas laterais.

**Indicado para casos de:**

- Entorse.
- Ligamento lesão.
- Lesão em cápsula conjunta.
- Tratamento estabilizador após imobilização prolongada.
- Instabilidade da articulação crónica.
- Pós-operatório.
- Reabilitação.
- Prevenção de reincidências de entorse.

**Imagens do Artigo:**