

Finalidade:

Ortótese Clavicular indicada para: Fratura da clavícula, pós-cirúrgica.

Efeitos: Facilita a formação do calo da fratura aproximando os segmentos através da retropulsão dos ombros. Exerce uma ampla tração sobre as articulações acromio-clavicular e coraco-clavicular.

Características:

Cintas inelásticas em forma de "figura oito". Ajustável: quatro pontos de ajuste independentes para regular a tração. Os micro fechos de velcro podem ser removidos para cortar as correias no comprimento desejado. Confortável: almofadas largas que se adaptam facilmente e previnem a irritação e a sobrepressão. Suportes dorsais e axilas almofadados suavemente.

Cores

BEGE, CINZA

Dimensões:

S, L

Contorno do Torax em Cm.

T.S (70-90 cm) , T.L (90-120 cm).

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CLA200

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:**Imagens do Artigo:**