# CINTA ABDOMINAL 4 BANDAS FJ184



#### Finalidade:

Faixa abdominal com 4 bandas é feita de um tecido elástico macio com um interior suave como o algodão. Concebido com bandas unidas mas independentes, que facilitam a adaptação à morfologia do paciente.

Possui grande área de fecho e ajuste de velcro. Indicado para casos de Pós-cirúrgia, Hérnias, Contusão torácica, Abdominoplastia, Lesões musculares abdominais e torácicas.

#### Características:

Duas cintas elásticas leves e respiráveis. Fixação ajustável de Velcro®. Sem látex 32cm de altura

#### Dimensões:

S: 65-80cm M: 80-95 cm L: 95-110 cm XL: 110-125 cm XXL: 125-140 cm 3XL: 140-155 cm

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ184

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento

2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas,

SL

## Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40 46200 Paiporta (Valencia) , Espanha Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

## Instruções de utilização:

Agarrando o cinto em suas extremidades com as duas mãos. Coloque o cinto na área abdominal na altura correta para o uso. Ajustar a tensão e fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

## **Imagens do Artigo:**



