

## ERGOGEL COMPLEX

**Finalidade:** Almofada ferradura anatómica anti escara, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco Elevado.

**Características:** Saniluxe – antiácidos, antipercevejo, impermeável, antiodor, macio, lavável. Capa Exterior: Poliuterano

Interior: Viscoelástico injetada e silicone.

**Peso máximo:** 120 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102430

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Dimensões:** 42x42x8 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. Capa lavável à mão ou na máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 95°C . Não usar centrifugação. Não usar lixívia.

**Não molhar o conteúdo da almofada.**

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro. Têm fitas que seguram a almofada ao assento, evitando movimento e/ou deslizamento.

**Imagens do Artigo:**

