

Finalidade: Máscara para os olhos com enchimento em gel, descongestionante, relaxante e calmante. Reduz inchaço e relaxa os músculos e ajuda a reduzir dores de cabeça.

Características:

Enchimento Suave com pérolas de gel. Usar no congelador para tratamento com frio e no microondas para tratamento com calor.

Não tóxico, reutilizável, higiénico. Retém a flexibilidade mesmo depois de congelado.

Ajustável à cabeça com o velcro.

Medida: 68 x 10 cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.042

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Nunca deixar o saco aquecer no microondas sem supervisão. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar num local seco e escuro.

Instruções de Utilização:

Áreas de aplicação: Inchaços, inflamação, nódoas negras, entorses, lesões de desporto, dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, tratamento de beleza e relaxamento.

Arrefecimento: olhos irritados, lacrimejantes ou vermelhos, comichão ou inchaço das pálpebras, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, febre dos fenos, irritação da pele, por exemplo, após tratamentos cosméticos;

Aquecimento: bloqueio dos seios nasais, preparação para tratamentos, relaxamento.

Imagens do Artigo:

