

# TORNOZELO

**Finalidade:**

É uma compressa insuflável fria para o tornozelo, que tem a forma de uma ligadura articular. Pode ser aplicado para tratar lesões agudas (ligamentos, articulações) e inchaços, e dores ou dores articulares súbitas ou crónicas (por exemplo, dores reumáticas). Pode também apoiar tratamentos e aplicações terapêuticas. Com bomba de ar, para regular a compressão. Gel Slow, para manter o frio durante mais tempo. Adaptável a qualquer medida da articulação devido ao seu sistema de velcro.

**Características:** Forra preta – 100% nylon; azul – 65% poliéster, 35% Algodão. Conteúdo – Celulose. Bomba de mão incorporada.

**Medida:** Adaptável a qualquer medida

**Cor:** Preto e azul

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 151.002

**Marca:** SISSEL

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland  
(Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Limpar com um pano húmido ou lavar à mão com detergente não abrasivo a baixa temperatura ou com um desinfetante. Evitar a exposição solar direta ou superfícies quentes.

**Instruções de Utilização:**

Coloque no congelador ou no frio dependendo do nível de frio que necessita. Verifique a temperatura e coloque o Cold Therapy Compression sobre a zona afectada, aplique compressão. Remova a bomba de ar manual.

O frio reduz a dor e espasmos musculares, uma vez que entorpece a área e proporciona alívio. A combinação de frio e pressão em forma de ligadura é muito eficaz. O frio é conhecido por reduzir a dor e o inchaço. A compressão suporta e estabiliza, aumentando a eficácia do frio. O inchaço, por exemplo, pode ser prevenido mais eficazmente ou é claramente reduzido. A almofada interior de frio livremente removível pode ser armazenada no frigorífico ou congelador.

**Imagens do Artigo:**