

JOELHO

Finalidade:

É uma compressa insuflável fria para o joelho, que tem a forma de uma ligadura articular. Pode ser aplicado para tratar lesões agudas (ligamentos, articulações) e inchaços, e dores ou dores articulares súbitas ou crónicas (por exemplo, dores reumáticas). Pode também apoiar tratamentos e aplicações terapêuticas. Com bomba de ar, para regular a compressão. Gel Slow, para manter o frio durante mais tempo. Adaptável a qualquer medida da articulação devido ao seu sistema de velcro.

Características: Forra preta – 100% nylon; azul – 65% poliéster, 35% Algodão. Conteúdo – Celulose. Bomba de mão incorporada.

Medida: Adaptável a qualquer medida

Cor: Preto e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 151.003

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido ou lavar à mão com detergente não abrasivo a baixa temperatura ou com um desinfetante. Evitar a exposição solar direta ou superfícies quentes.

Instruções de Utilização:

Coloque no congelador ou no frio dependendo do nível de frio que necessita. Verifique a temperatura e coloque o Cold Therapy Compression sobre a zona afectada, aplique compressão. Remova a bomba de ar manual.

O frio reduz a dor e espasmos musculares, uma vez que entorpece a área e proporciona alívio. A combinação de frio e pressão em forma de ligadura é muito eficaz. O frio é conhecido por reduzir a dor e o inchaço. A compressão suporta e estabiliza, aumentando a eficácia do frio. O inchaço, por exemplo, pode ser prevenido mais eficazmente ou é claramente reduzido. A almofada interior de frio livremente removível pode ser armazenada no frigorífico ou congelador.

Imagens do Artigo: