




MANUAL DE INSTRUÇÕES – SISSEL – FIT BAND

REF.ª 163.005 / 163.006 / 163.007 / 163.009 / 163.010 / 163.011 / 163.012 / 163.013 / 163.014 / 163.015 / 163.016 / 163.060 / 163.061 / 163.062 / 163.101 / 163.102 / 163.103 / 163.104

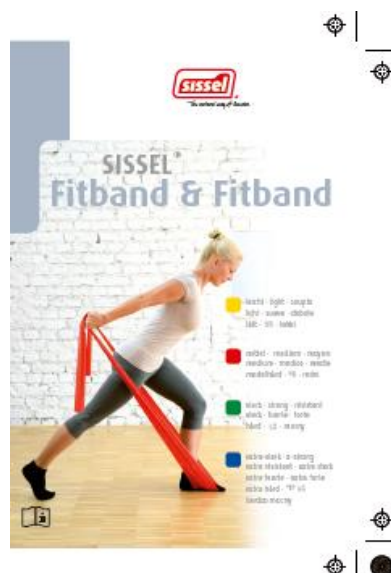

Informação sobre o produto

O apoio simples e eficaz para fisioterapia, aumento muscular e aptidão física de alta qualidade oferece uma vasta gama de aplicações: utilização em terapia, reabilitação, para tonificação, correção de postura, treino de equilíbrio, consciência corporal, melhoria da flexibilidade disponível em 4 resistências, 2 larguras e 6 comprimentos para exercícios progressivos de resistência e aplicações ajustadas individualmente, também com clipe para ajuste seguro e flexível do comprimento

Características:

Produto natural feito de borracha pura com comportamento de resistência linear fiável. O processo de fabrico elaborado reduz o peso do pó

Instruções de segurança

Ao utilizar Fitbands, siga sempre as recomendações do seu médico ou terapeuta.

As crianças só podem utilizar a banda sob a supervisão de um adulto e após uma terapia de acompanhamento

Nota: Não adequado para bebés.

Verificar a banda quanto a danos (furos, fendas, cortes) antes de cada utilização. Não utilizar danificado, substitua-as, em vez disso.

Não esticar demasiado a banda, não criar demasiada tensão. Escolher a banda que corresponde a sua condição física e força muscular.

Tenha cuidado com os exercícios à altura da cabeça! Afaste-se dos olhos, a banda pode escorregar de mão ou suporte e estalar na cara!

Assegure-se de que a faixa não pode soltar-se da moldura da porta ou soltar-se da cadeira ou de outros objetos.

Assegure-se de que a porta está fechada durante o exercício.

Para bandas com clipe, verificar também se o clipe está danificado. Assegure-se de que o fecho está trancado firmemente no lugar, não se pode abrir e a banda não se pode soltar!

Armazenamento/cuidado

A banda SISSEL® Fitband (devido ao seu processo especial de fabrico) requer apenas um mínimo de pó.

Se estiver suja, lavar a banda com água limpa, secar ao ar e pulverizar levemente apenas quando necessário. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes. Proteger de danos causados por joias ou unhas afiadas. Lavar bem após utilização em água clorada.

Nota

Os produtos em látex podem causar reações alérgicas. Embora os alergénicos causadores de alergias no SISSEL®

O fitband foi reduzido através de um processo de fabrico especial, há sempre o risco de uma reação alérgica para o utilizador.