

**Finalidade:**

Calosidades interdigitais (olhos de galo ou helomas), flexíveis de Halux Valgus

Cirurgia do Joelho

Alinhamento passivo da primeira junção metatarsofalangeal no Halux Valgus flexível para sapatas largas, evita a formação de calos interdigital.

Reduz a pressão e previne o chaping no espaço interdigital

**Características:**

Separador do primeiro dedo no Hallux Valgus. O anel embutido mantém o espaçador na posição. Feito de silicone extra macio de grau médico, adapta-se á temperatura corporal, e é lavável

**Dimensões:** S, M, L

**2 cores disponíveis:** cinza metal e vermelho metal

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Dispositivo Médico 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** POD201

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar com água e sabão neutro

Polvilhar com pó talco para garantir a sua durabilidade.

**Instruções de utilização:**

Colocar o anel no segundo dedo do pé com o separador entre este e o primeiro dedo.

Muito suave e fácil de usar.

O duplo anel ajuda a que o separador se mantenha sempre no sitio certo ao mesmo tempo que evitam que os dedos rocem uns nos outros.

Este produto, graças à sua densidade especial e aos óleos medicinais que contém, suaviza e protege a pele.

Oferece uma proteção em calos, bolhas e fricções interdigitais, diminuindo a fricção e a dor.

Ajuda no alinhamento dos dedos por problemas de unhas encravadas ou no período pós-operatório. Ajuda a que na situação de aparecimento dos joanetes os dedos mais fortes não ocupem o lugar dos mais pequenos.

**Imagens do Artigo:**