

**Finalidade:** Apoio/Ajuda de segurança, na utilização da casa de banho para pessoas com dificuldade motora.

**Características:** Pega é composta por pvc.

**Cor:** Branco

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação: Modelo:** Classe I

**Marca:** Mopedia (Moretti)

**Dimensões:** 45cm de comprimento, 36mm diâmetro

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Escolha uma parede sólida e segura para instalar a peça. Certifique-se de que é possível perfurar a parede com segurança para pessoas e coisas. Certifique-se de posicionar a barra de alça na altura mais adequada para os usuários. Levante a tampa da flange para mostrar o parafuso do orifício. Coloque a alça até a parede na posição desejada e marque a posição do orifício do parafuso. Use um pano húmido e sabão suave. Depois seque bem antes de utilizar. Se necessitar de desinfetar o dispositivo utilize um desinfetante comum.

**Nota:** Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes como a acetona.

**Instruções de Utilização:** Esta barra de apoio foi concebida para ajudar o seu movimento natural, como quando entra ou sai de um chuveiro. A pega/apoio do banho não foi concebida para manter ou suportar o seu peso corporal total.

**Imagens do Artigo:**

