

Finalidade: Apoio/Ajuda de segurança, na utilização da casa de banho para pessoas com dificuldade motora.

Características: Pega é composta por pvc.

Cor: Branco

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Modelo: Classe I

Marca: Mopedia (Moretti)

Dimensões: 60 cm de comprimento, 36mm diâmetro

Declaração de conformidade: Diretiva 2007/47

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Escolha uma parede sólida e segura para instalar a peça. Certifique-se de que é possível perfurar a parede com segurança para pessoas e coisas. Certifique-se de posicionar a barra de alça na altura mais adequada para os usuários. Levante a tampa da flange para mostrar o parafuso do orifício. Coloque a alça até a parede na posição desejada e marque a posição do orifício do parafuso.

Use um pano húmido e sabão suave. Depois seque bem antes de utilizar. Se necessitar de desinfetar o dispositivo utilize um desinfetante comum.

Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes como a acetona.

Instruções de Utilização: Esta barra de apoio foi concebida para ajudar o seu movimento natural, como quando entra ou sai de um chuveiro. A pega/apoio do banho não foi concebida para manter ou suportar o seu peso corporal total.

Imagens do Artigo:

