



CADEIRA DE DESCANSO

MERCATO



MANUAL DE USO

INTRODUÇÃO:

Esta poltrona foi concebida para proporcionar o máximo conforto. Está equipado com um descanso para as pernas muito simples de manobrar.

Leia atentamente este folheto para tirar o máximo partido desta cadeira.

Este manual deve ser disponibilizado para posterior utilização após a primeira leitura.

RESUMO

1 SEGURANÇA	p. 2
2 CARACTERÍSTICAS	. p. 3
3 MONTAGEM	p. 3
4 MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO	p. 4

1. SEGURANÇA:

Cuidado.

- A cadeira deve ser montada corretamente de acordo com as instruções aqui descritas.
 O fabricante, os seus agentes e distribuidores não se responsabilizam por danos causados por uma montagem inadequada da cadeira.
- A cadeira deve ser colocada num piso plano.
- Não utilize a cadeira num ambiente húmido ou poeirento. Deve ser usado num quarto seco.
- Não coloque a cadeira perto de radiadores, fogões ou outra fonte de calor. Evitar exposição contínua à luz solar.
- Não utilize a cadeira ao ar livre.
- Não descanse nem coloque um objeto pesado sobre o apoio para os braços, o apoio para os pés ou a parte de trás da cadeira.
- Não salte nem brinque na cadeira.
- <u>Não coloque os dedos</u> ou **as** mãos entre o assento e **o descanso** da perna, quando a cadeira estiver **inclinada** ou **quando** estiver **a ser** manobrada.
- Esta cadeira deve ser utilizada de acordo com as instruções fornecidas.
- Esta cadeira não é para uso profissional.
- O fabricante, os seus agentes e distribuidores não são responsáveis por lesões corporais ou danos materiais resultantes de utilização indevida e abuso desta cadeira.

Cuidado.

Utilize a cadeira numa sala a uma temperatura moderada, não aumente a temperatura de forma acentuada. Recomenda-se aumentar gradualmente a temperatura para um nível normal.

Verifique regularmente o estado fazer Revestimento.

2. CARACTERÍSTICAS:

Peso: Peso da cadeira = 43 kg

Carga máxima = 120 kg

Dimensões do assento: Profundidade = 52 cm, largura = 51 cm, altura = 48 cm

Dimensão geral: Longoueur = 105/154 cm, largura = 65 cm, altura = 90/88

cm Material do revestimento: P.U - PVC - Poliéster dependendo da versão.


Composição de enchimento: Espuma P.U e fibra de poliéster

Chassis: Madeira

3. MONTAGEM:

A poltrona está embalada numa caixa. O encadado e o assento devem ser montados de acordo com as instruções a seguir indicados.

Nota: Não monte a cadeira se os estofos ou partes da cadeira estiverem danificados. Verifique cuidadosamente todas as peças antes de montar a cadeira. Em caso de problemas, contacte o vendedor.

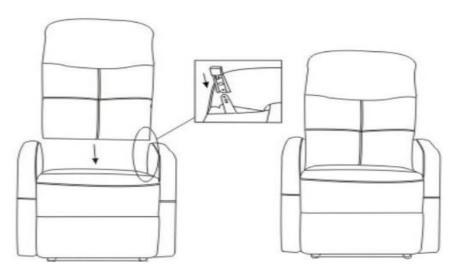





Cuidado:

- Certifique-se de que não existem obstáculos à frente e atrás da cadeira antes de operara a mesma.
- Não introduza dedos ou objetos entre a cadeira e o apoio para os pés.

4. DICAS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Limpe com uma esponja húmida se o revestimento for feito de PU ou PVC, e com um removedor de manchas de tecido se o revestimento for feito de tecido.
- Mantenha a cadeira limpa e seca, longe da humidade.
- Se a cadeira não for utilizada durante muito tempo, cubra-a com um pano limpo para a proteger do pó. Guarde-o numa sala seca.
- Não guarde a cadeira à **luz direta** do sol ou em locais com temperaturas elevadas. Isto pode levar à descoloração do tecido.

IDENTIDADES