

Finalidade:

Tabuleiro universal para cadeira de rodas, aplicando-se nos apoios de braços através das 2 tiras de velcro. Com dois encaixes para colocar copos.

Características:

Composição: Melamina a imitar madeira
Com dois encaixes para colocar copos.
2 tiras de velcro para prender nos braços da cadeira.

Dimensões: 60 x 28/50cm. Largura interior 40cm

Cor: Madeira

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 114015

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpe com detergente suave e água, seque a toalha.

Instruções de utilização:

Posicione a bandeja e coloque-a diretamente em cima das armas da cadeira de rodas, como mostrado.

Pegue as correias de velcro em cada lado da bandeja e enrole-a em torno de cada apoio de braço individual; afixe o gancho e o laço até que se encaixe firmemente no lugar.

Imagens do Artigo: