

Finalidade:

Banco de chuveiro de parede;

Características:

Estrutura em aço pintado. Assento em polipropileno. Pés com pontas antiderrapante.

Suporte de ancoragem: 33x15,5x0,4 cm

Assento: 51 x 31 x 8 cm

Distancia entre a parede e o assento aberto: 12 cm;

Altura ajustável: 38 a 52 cm;

Dimensões: 51x54x(85-98,5)cm;

Peso Máximo de carga: 100kg;

Cor: Branco;

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Embalagem: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe I;

Modelo: RS918;

Marca: Onda (Moretti);

Fabricante: Moretti S.P.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e Limpeza:**Não exceda a capacidade máxima de carga.**

Para limpar utilize uma solução de álcool e sabão neutro (em partes iguais) misturada com água. Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, produtos de limpeza à base de cloro, desinfetantes e acetona durante a limpeza para evitar abrasão das superfícies plásticas e ferrugem das superfícies metálicas.

Instruções de Utilização:

Retire o grampo, deslize a perna para fora para a posição pretendida e empurre o grampo firmemente para dentro do orifício. Deve ajustar a altura da perna e do trilho antes de fixar a placa de montagem à parede.

Imagens do Artigo: