

**Finalidade:** Andarilho de encartar, auxiliar manuseados por dois braços capazes para apoiar e/ou ajudar a mobilidade de pessoas com dificuldades em andar.

**Características:**

Estrutura: Tubo de alumínio de diâmetro 22m.

Pegas: Polipropileno

Pontas: Borracha antiderrapante

Andarilho dobrável 2 rodas fixas com altura ajustável e 2 pontas.

RP735S – Altura ajustável de 65 a 75cm, a cada 2,5 cm 5 orifícios;

RP735M – altura ajustável de 72 a 82 cm

Carga máxima: 130Kg

**Dimensões:** RP735S – 60 x 45 x 59 cm;

RP735M – 60 x 47 x 59 cm

**Lote:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Data de produção:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Cor:** Cinzento

**Caixa:** 1 unidade;

**Declaração de Conformidade:** Diretiva 93/42/CEE;

**Classificação:** Classe 1;

**Modelo:** RP735S; RP735M

**Marca:** Mopedia (Moretti);

**Fabricante:** Moretti S.p.A.;

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

**Importador e Distribuidor:** Gerimais, Lda.;

**Morada do Importador e Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujidade mais difícil. Seque bem antes de usar;

**Instruções de Utilização:**

1. Com o braço estendido, o cabo do andarilho deve estar à altura do pulso. Com a mão apoiada na pega, o cotovelo deve estar dobrado 20°-30°;
2. Para transferir o paciente da cadeira de rodas para o andarilho, certifique-se de que as rodas da cadeira de rodas e andarilho estão bloqueadas;
3. Andarilho com pontas: andar com o andarilho, levatá-lo e colocá-lo confortavelmente à sua frente, certificando-se de que as quatro pernas estão apoiadas no chão;
4. Andarilho com rodas: Para caminhar com o andarilho, empurre-o confortavelmente à sua frente, certificando-se de que as quatro pernas, mesmo as equipadas com rodas, estão apoiadas no chão.

**Imagens do Artigo:**

