

Finalidade:

Tala dinâmica para dedo da mão, é acomodada desde a cabeça do metacarpo até á articulação interfalângica distal. É usada para auxiliar a articulação interfalângica proximal (IFP), em extensão aumentada. Tem um efeito mínimo na extensão metacarpofalângica (MCF)

Características:

Feito de arame forrado para melhor conforto. A almofada central de contorno distribui a pressão uniformemente através da articulação (IFP). A curvatura da almofada distal é concebida para o conforto do paciente. A tensão pode ser ajustada através de uma ligeira flexão do material

Dimensões:

Para determinar o comprimento da tala, meça o dedo envolvido da prega palmar até a dobra do dedo distal quando o dedo é estendido

XS , S, M, L , XL

Medida: XS (5.7) , S (7), M (7.6), L (8.9), XL (10)

Cor: Branco

Lote e Data de Produção: Ver embalagem

Diretiva: (UE) Regulamento 2017/745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: IF501

Marca: EMO

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O produto pode ser limpo manualmente em água morna com detergente neutro. Certifique-se que o produto esteja seco antes de armazená-lo, usá-lo e reutilizá-lo.. Manter longe da luz solar. Não utilize solventes, abrasivos ou qualquer produto químico que possa deteriorar as propriedades do material.

Instruções de utilização:

Encaixe da Tala: Segure a tala dinâmica na altura dos apoiadores proximal e distal. O apoiador proximal tem o fio coberto de plástico branco atrelado a ele. Deslize a tala sobre o dedo, de forma que o apoiador proximal encoste no lado palmar da cabeça do metacarpo, e o apoiador distal encoste na articulação interfalângica distal (IFD)

Ajuste a Tensão da Tala: Para aumentar a força da extensão, abra os apoiadores palmares antes de colocar no dedo. Para diminuir a força da extensão, aperte os apoiadores palmares para uni-los antes de colocar no dedo.

Imagens do Artigo: