



Improving Care. Improving Business.

PORTUGUÊS

TALA DINÂMICA PARA DEDO DA MÃO EXTENSÃO INTERFALÂNGICA PROXIMAL METACARPAL

	USO EM UM ÚNICO PACIENTE
	NÃO ESTÉRIL
	NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL
SOMENTE PARA RX	A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRINGE A VENDA OU UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO PARA OU MEDIANTE A PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTORIZADO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia todos os avisos e instruções antes de usar. A aplicação correta é essencial para o funcionamento adequado do produto e para reduzir o risco de lesão ou reincidência de lesão inerente ao uso de qualquer produto.

FINALIDADE DE USO

A tala dinâmica para dedo da mão DeRoyal® é acomodada desde a cabeça do metacarpo até a articulação interfalângica distal. Ela é usada para auxiliar a articulação interfalângica proximal (IFP) em extensão aumentada. Tem um efeito mínimo na extensão metacarpofalângica (MCF).

PRECAUÇÕES

- Um médico ou um profissional de saúde autorizado (um "profissional da área de saúde") familiarizado com o uso e a finalidade deste produto deve colocá-lo no usuário. O profissional da área de saúde tem o dever de fornecer instruções de uso e informar os riscos relacionados ao uso deste produto a outros profissionais de saúde que tratam os usuários, bem como aos próprios usuários, incluindo a duração do uso. As instruções fornecidas neste encarte não substituem o protocolo hospitalar ou ordens diretas do profissional da área de saúde.
- Use somente conforme as instruções dadas pelo médico.
- O uso prolongado pode resultar em atrofia muscular no usuário. O usuário pode precisar de (1) um período de retirada gradual do produto para construir força muscular, (2) exercícios de fisioterapia regulares para manter a força do dedo, (3) uma limitação na duração do uso ou (4) alguma combinação desses itens.
- Inspeccione o produto quanto a componentes danificados ou ausentes antes do uso.
- Interrompa o uso e consulte seu profissional da área de saúde se o produto ou seus componentes quebrarem ou forem danificados.
- Inspeccione o ajuste do produto no paciente para garantir que ele seja apropriado. **NÃO APERTE DEMAIS.** Verifique regularmente para garantir que a circulação não esteja comprometida.
- Consulte imediatamente seu profissional da área de saúde se houver alterações de sensibilidade, reações incomuns, inchaço ou aumento da dor durante o uso deste produto. Interrompa o uso se ocorrerem lesões

por pressão.

- Tome cuidado especial se o usuário for diabético ou tiver má circulação. Esses usuários podem ter sensibilidade cutânea diminuída e correm um risco maior de má circulação periférica e lesões por pressão.

TAMANHOS

Para determinar o comprimento da tala, meça o dedo envolvido da prega palmar até a dobra do dedo distal quando o dedo é estendido.

TAMANHO	COMPRIMENTO
AA	2 1/4" 5,7 cm
A	2 3/4" 7 cm
B	3" 7,6 cm
C	3 1/2" 8,9 cm
D	4" 10 cm

INSTRUÇÕES DE USO

ENCAIXE DA TALA DINÂMICA (A)

- Segure a tala dinâmica na altura dos apoiaadores proximal e distal. **NOTA:** O apoiador proximal tem o fio coberto de plástico branco atrelado a ele.
- Deslize a tala sobre o dedo, de forma que o apoiador proximal encoste no lado palmar da cabeça do metacarpo, e o apoiador distal encoste na articulação interfalângica distal (IFD).

AJUSTE A TENSÃO DA TALA DINÂMICA (B)

- Para aumentar a força da extensão, abra os apoiaadores palmares antes de colocar no dedo.
- Para diminuir a força da extensão, aperte os apoiaadores palmares para uni-los antes de colocar no dedo.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Lave manualmente em água morna com detergente neutro. Seque ao ar livre antes de usar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

	MANTER SECO
	MANTER LONGE DA LUZ SOLAR

GARANTIA

Os produtos DeRoyal® possuem garantia por cento e vinte (20) dias a partir da data de expedição pela mesma, em relação à qualidade do produto e à mão de obra. **AS GARANTIAS POR ESCRITO DA DEROYAL SÃO FORNECIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.**