

Finalidade: A nossa cadeira de sanita das Caraíbas garante uma utilização muito confortável graças ao seu assento de espuma muito espessa e à forma do seu apoio de braços. O assento tem uma tampa que é fácil de remover por si só. Balde amovível de lado ou de cima. O assento pode ser completamente removido para limpeza. Com uma altura de assento ajustável de 46 a 62 cm para se adaptar a todos os tamanhos de utilizador. **Benefícios:** - Assento com tampa de fácil remoção - Grande encosto para apoiar as costas - Assento grosso totalmente removível - Cadeira perfurada

Características: Estrutura de aço epoxídico cinzento e cobertura de PVC impermeável - Peso: 6 Kg Carga Máxima Suportada: 130Kg.

Dimensões:

- Diâmetro - Balde: 30 cm.
- Espessura - Assento: 35 mm.
- Altura - assento máximo : 64 cm.
- Altura - Assento mínimo : 46 cm.
- Altura - Costas : 35 cm.
- Altura: 81 cm a 91 cm.
- Largura - Entre apoios de braço: 51 cm.
- Largura - Assento: 44 cm.
- Largura - Total: 60,5 cm.
- Comprimento - Apoio de braço: 24 cm.
- Abertura: 26 x 21 cm.
- Profundidade - Assento: 40 cm.
- Profundidade - Balde: 16 cm.

Cor: Azul Marinho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42 ECC

Classificação: Classe I

Modelo: 811146

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. A fim de garantir uma utilização segura e um padrão adequado de higiene, o utilizador deve realizar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

Instruções de utilização:

A nossa cadeira de sanita garante uma utilização muito confortável graças ao seu assento de espuma muito espessa e à forma do seu apoio de braços. O assento tem uma tampa que é fácil de remover por si só. Balde amovível de lado ou de cima. O assento pode ser completamente removido para limpeza.

Imagens do Artigo:

