

Finalidade: Apoio dorsal concebido para integração numa ortese lombossacral, transformando-o numa ortese dorsolombar. Adaptável a qualquer tamanho da ortese lombossacral. Indicado para: Dores nas costas, saliências e outras degenerações do disco, doença do disco, processos lombossacrais (espondilite, espondilolistese, espondilose), osteoporose, hipotonia muscular, trauma, fraturas de disco e compressão vertebral, fraturas vertebrais, reabilitação postural e pós-cirúrgico, limita a mobilidade de flexão-extensão e imobiliza os movimentos laterais e rotacionais.

Efeitos - Juntamente com a ortese sacrolombar Lumback: Retropulsão dos ombros

Características: Adaptável a qualquer tamanho da ortese lombossacral Lumback.

Incorpora duas lâminas de aço, confortável amovíveis e adaptáveis.

As alças acolchoadas do ombro escapulo-axilar podem ser ajustadas por meio de micro-velcro ou por meio de fivelas fáceis e rotativas.

Dimensões: Tamanho Único – Altura: 50cm

Cores: Bege e Cinza

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: DLS230

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão com água quente (30° máximo) e sabão neutro. Durante a lavagem, colar as peças de velcro e mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não utilizar ferro de engomar. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Para lavagem a seco coloque a peça a uma fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Estender a Ortese lombo-sacral e juntar o apoio ao incorporar os micro-velcros. Pode escolher a altura da ortese de acordo com o nível que o velcro adira. , uma vez montada a peça, coloca-la no paciente, passando as tiras sobre os ombros, por baixo das axilas, fazendo uma cruz na região dorsal e perto da área abdominal através das extremidades da fivelas. Depois da fivela fechada, puxar para trás e ajustar. A Ortese pode ser usada sem as fivelas, basta removê-las e passar pelos micro-velcros as tira sobre a área abdominal.

