

Finalidade:

Banco de Banho Dobrável muito leve e fácil de transportar. Adaptado às necessidades dos idosos ou deficientes. Banco ortopédico de 3 posições, ajustável em altura. O seu uso é recomendado para idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou indivíduos que tenham alguma dificuldade em permanecer em pé por muito tempo. O assento de banho também é adequado para ser usado por crianças, pois facilita a limpeza para os pais. Pode ser usado por todos os membros da família. É um banco ergonómico que serve para tomar um banho mais descontraído e promover o descanso durante a limpeza diária, além de proporcionar confiança e estabilidade.

Características:

Estrutura em Alumínio e assento em PVC com furos para facilitar o escoamento da água. Banco ergonómico fácil de usar e transportar. Ponteiros antiderrapantes em borracha. Facilmente ajustável em altura em 3 posições. Peso Máximo Suportado: 130 Kg

Dimensões:

Dimensões totais: largura 53 x profundidade 43/47 cm.

Dimensões do assento: largura 51 x profundidade 30 x altura 43/47 cm.

Cor:

Cinza – 812031.Gris

Branco - 812031

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

812031.Gris (cinzento)

812031 (Branco)

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France -

www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

É de fácil limpeza, lavar com detergente neutro e enxaguar com água. Não utilizar lixívia nem produtos corrosivos. Verificar regularmente. Não Utilizar numa banheira.

Instruções de utilização:

- 1 - Retirar o artigo da sua caixa e verificar o seu estado.
- 2 - Virar o banco, sentado de barriga para baixo. Desdobre as pernas e coloque a secção em U (marcada 2 no produto) na sua caixa metálica na parte inferior do assento. Inserir as extensões das pernas de acordo com as marcas 1 e 2.
- 3 - Voltar a colocar o banco na sua posição normal e pressionar para baixo no banco de modo a que a secção em U esteja totalmente engatada e fixada na sua caixa.
- 4 - A altura das pernas pode ser ajustada pressionando os pinos de mola. Ajustar para a altura desejada.

Imagens do Artigo: