



CE Producto sanitario de clase I  
REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO Y DEL CONSEJO  
del 5 de Abril 2017 sobre los productos sanitarios

#### CÓDIGOS

ST422/R TORNQUETE ROJO  
ST422/B TORNQUETES AZUL

#### INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un torniquete de la línea EASYRED de MORETTI S.p.A. Los torniquetes EASYRED de MORETTI S.p.A. han sido diseñados y fabricados para satisfacer todas sus necesidades, en vistas de un uso práctico y correcto. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido así como valiosos consejos para su seguridad. Se recomienda leer el manual completo detenidamente antes de utilizar el torniquete. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

#### FINALIDAD

El torniquete es un dispositivo que sirve para detener el flujo sanguíneo. Se utiliza durante una toma de muestras de sangre o durante intervenciones de primeros auxilios para el tratamiento de hemorragias externas.

#### DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Moretti S.p.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI Spa que hacen parte de la familia TORNQUETES son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 Abril 2017. Para ello, MORETTI Spa. declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

- Los productos en cuestión satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestación como requerido por el anexo I del reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
- Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
- Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
- Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
- Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
- MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el Regl6.

**Nota:** Los códigos completos de los productos, el código de registraci6n del Fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas se encuentran en la Declaraci6n de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y mete a disposici6n a trav6s de sus canales.

#### SÍMBOLOS

- C6digo producto
- Identificaci6n 6nica de productos
- Marcado CE
- Fabricante
- Lote de producci6n



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminaci6n de 2017/45

#### MODO DE USO



- Presionar el bot6n y desenganchar la hebilla.
- Envolver el torniquete alrededor de la extremidad y cerrar la hebilla.
- Tire del el6stico hacia afuera hasta que la extremidad est6 bloqueada.
- Para abrir el torniquete presionar el bot6n en la hebilla.

#### ADVERTENCIAS PARA EL USO

Para un uso correcto del dispositivo consulte cuidadosamente al siguiente manual. Prestar siempre atenci6n a la presencia de ni6os.

#### LIMPIEZA

Para la limpieza de las partes utilizar exclusivamente agua tibia y detergente neutro.

#### ADVERTENCIAS GENERALES

Queda prohibido el uso del siguiente producto para fines distintos de los definidos en el siguiente manual. La MORETTI S.p.A. declina toda responsabilidad por da6os causados por un uso inadecuado del dispositivo o por un uso diferente de lo indicado en el presente manual. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en el producto y el siguiente manual sin previo aviso con el fin de mejorar sus caracteristicas. El usuario y/o el paciente deber6n comunicar cualquier accidente grave en relaci6n con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que est6 establecido el usuario y/o el paciente.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: l6tex natural cubierto de nylon  
Longitud: 45 cm  
Ancho: 2,5 cm  
Peso: 32g

#### GARANTÍA

El producto est6 garantizado 2 A6OS de la fecha de compra. El distribuidor se reserva el derecho de reparar o reemplazar las piezas afectadas por defectos de fabricaci6n o en materiales usados, sin ning6n gasto para el cliente. La garantía no es aplicable en caso de da6os relacionados con un uso inadecuado, abusos, alteraciones o desmontaje efectuado por personal no autorizado. Para reparaciones, en el respeto de las condiciones antedichas, enviar el producto provisto del recibo de compra al distribuidor local m6s cercano.



#### CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto \_\_\_\_\_  
Fecha de compra \_\_\_\_\_  
Distribuidor \_\_\_\_\_  
Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_  
Vendido a \_\_\_\_\_  
Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

Moretti S.p.a.  
INTERNET: www.morettispa.com  
E-MAIL: info@morettispa.com  
MADE IN P.R.C.



CE Dispositivo m6dico de clase I  
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO  
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO,  
de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos m6dicos

#### CÓDIGOS

ST422/R TORNQUETE VERMELHO  
ST422/B TORNQUETE AZUL

#### INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um torniquete Easyred da Moretti S.P.A. O seu design e qualidade garantem conforto, segurança e confiança ao utilizador. Os torniquetes Easyred by Moretti S.P.A foram concebidos para satisfazer todas as suas necessidades. Este manual de instruções contém conselhos para a sua segurança e para um uso correto do dispositivo. Em caso de d6vidas, entre em contacto com o seu vendedor.

#### UTILIZAÇÃO PREVISTA

O torniquete 6 um dispositivo que bloqueia o fluxo sanguineo. Pode ser usado durante a coleta de sangue ou para o tratamento de hemorragia externa em primeiros socorros.

#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI SpA e fazendo parte da fam6lia de XXXXXXXX est6o em conformidade com as disposiç6es aplic6veis do Regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS M6DICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

- Os dispositivos em objeto satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho do anexo I do regulamento 2017/745, conforme previsto no anexo IV do regulamento supracitado.
- Os dispositivos em objeto N6O S6O INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
- Os dispositivos em objeto N6O SE DESTINAM A ESTUDOS CLÍNICOS.
- Os dispositivos em objeto s6o comercializados em embalagens N6O EST6REIS.
- Os dispositivos em objeto devem ser considerados como pertencendo 6 classe I, em conformidade com as disposiç6es do anexo VIII do regulamento supracitado.
- A MORETTI SpA conserva e coloca 6 disposiç6o das autoridades competentes, durante um prazo m6nimo de 10 anos a partir da data de fabrico do 6ltimo lote, a documentaça6o t6cnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

**Nota:** Os c6digos completos do produto, o c6digo de registo do fabricante (SRN), o c6digo UDI-DI de base e eventuais refer6ncias 6s normas utilizadas s6o indicados na Declaraç6o de Conformidade UE emitida pela MORETTI SPA e disponibilizada atrav6s dos canais apropriados.

#### SIMBOLOGIA UTILIZADA

- C6digo do produto
- Identificador exclusivo do dispositivo
- Marca CE
- Fabricante
- Lote de produç6o
- Ler o manual de instruç6o



Dispositivo m6dico



Condiç6es de eliminaç6o

#### MODO DE UTILIZAÇÃO



- Pressione o bot6o na fivela e abra-o.
- Coloque o torniquete em volta do braço e feche a fivela.
- Puxe o el6stico para fora at6 que o braço esteja bloqueado.
- Pressione novamente o bot6o na fivela para abrir o torniquete.

#### ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO

Para o uso correto do dispositivo, consulte o manual cuidadosamente. Preste sempre atenci6o 6 presença das crianças.

#### LIMPEZA

Para limpar as peças, utilize somente 6gua morna e detergente neutro.

#### AVISOS GERAIS

N6o use o produto para uma finalidade n6o indicada neste manual. A Moretti S.P.A declina todas as responsabilidades por quaisquer consequ6ncias resultantes de uma utilizaç6o incorreta deste produto e de alteraç6es n6o autorizadas do produto. O fabricante pode modificar o dispositivo ou o manual de instruções sem notificaç6o pr6via.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: l6tex natural coberto com nylon  
Comprimento: 45 cm  
Largura: 2,5 cm  
Peso: 32 g

#### GARANTIA

O produto tem garantia de 2 anos a partir da data de compra, que 6 certificada pelo recibo ou fatura. O distribuidor reserva o direito de consertar ou substituir as peças necess6rias para corrigir defeitos nos materiais ou m6o-de-obra sem qualquer custo. A garantia n6o se aplica a danos resultantes do n6o cumprimento das instruções operacionais, acidentes, abuso, alteraça6o ou desmontagem por pessoas n6o autorizadas. Caso seja necess6rio consertar o produto e cumprir as condiç6es da garantia, envie o produto ao revendedor mais pr6ximo, juntamente com o recibo de compra.



#### CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto \_\_\_\_\_  
Data de Compra \_\_\_\_\_  
Vendedor Autorizado \_\_\_\_\_  
Rua \_\_\_\_\_ Local \_\_\_\_\_  
Vendido \_\_\_\_\_  
Rua \_\_\_\_\_ Local \_\_\_\_\_

Moretti S.p.a.  
INTERNET: www.morettispa.com  
E-MAIL: info@morettispa.com  
MADE IN P.R.C.

Distribuido por Britos Lda - Portugal