

Finalidade:

Esta prática calçadeira permite-lhe calçar as suas meias sem se inclinar para baixo. O comprimento é escolhido de acordo com as suas necessidades.

Características:

Polipropileno.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 819050

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido. Manter seco.

Instruções de utilização:

Esta prática calçadeira permite-lhe as suas meias sem se inclinar para baixo. O comprimento é escolhido de acordo com as suas necessidades.

O calçador de meias é muito fácil de usar: coloque a parte superior da meia ou meia de compressão em seus 2 entalhes.

Tudo o que você precisa fazer é deslizar o pé e puxá-lo com suas tiras de algodão.

Então é fácil de remover ao colocar a meia ou meia de compressão.

Imagens do Artigo: