

Finalidade: Almofada de ar ergonómica, dinâmica e prática. Que também dá para a prática de exercícios em pé ou sentada. A forma segura e confortável de melhorar ativamente a postura sentada, também é uma alternativa conveniente e simples a uma bola de ginástica normal, ergonómica, dinâmica e prática.

Características: É anti deslize seguro. são produzidos com CITROFOL® BII, um amaciador de PVC baseado em recursos renováveis. CITROFOL® é uma excelente alternativa para produtos com padrões elevados. É por esta razão que pode cheirar a vinagre (em vez de "químico"), desaparecendo ao fim de algum tempo.

Peso máximo do utilizador: 138 kg

Medida: 37 cm

Cor: Azul – 160.070
Vermelho – 160.071
Preto 160.074

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 160.070, 160.071, 160.074

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpar com pano húmido, água e produtos de limpeza não agressivo ou desinfetante. Secar ao ar livre. Não usar secadores qualquer fonte de calor ou luz solar direta que pode danificar o produto.

Instruções de Utilização: Indicado para dores de costas posturais (lombares, torácicas, cervicais). Dores de cabeça causadas por deficiências posturais. Desequilíbrio muscular do tronco. Prevenção de dores lombares causadas por sessões prolongadas. Exercita os músculos das costas, do fundo da pélvis, das pernas e dos braços em pé, sentado e na posição em pé.

Contra indicações: Fracturas instáveis da coluna vertebral ou da pélvis, feridas abertas, qualquer enfermidade para a qual o médico assistente aconselha contra a utilização de uma almofada de ar.

Imagens do Artigo:

