

Finalidade: O tapete Acupressur é baseado nas antigas tradições indianas. Tem um efeito relaxante no tratamento do pescoço, desconforto nos ombros e costas. Ajuda para combater as perturbações do sono e outras doenças, promovendo um sono repousante.

Áreas de aplicação: Redução de dor; melhoria na circulação sanguínea; relaxamento; perturbações do sono, stress; dores musculares.

Efeitos secundários: Após a aplicação, uma ligeira sensação de sonolência pode ocasionalmente ocorrer. Isto é completamente inofensivo. Em casos raros momentâneos dores de cabeça ou tonturas podem ocorrer após o tratamento. Estas constituem uma reação natural do corpo.

Características: TPE reciclável e higiénico

Medida: 40 x 60 cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 161.051

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Pode ser lavado com água quente e desinfetado. Quando for arrumado deverá haver um cuidado redobrado para os picos não entrarem em contato com os olhos.

Instruções de Utilização:

Os pacientes que sofram de uma lesão no pescoço podem sentir inicialmente dores no pescoço ou tonturas. Recomenda-se reduzir inicialmente a aplicação duração até 15 minutos dia sim, dia não. Posteriormente, os tratamentos podem ser intensificados gradualmente. Pacientes que sofrem de fibromialgia e o aumento da sensibilidade à dor deve inicialmente limitar a utilização a um curto período e utilizar uma camada de tecido mais grossa entre o corpo e o tapete.

Advertências:

- Não magoar as mãos ao subir ou sair do tapete!
- Se sentir náuseas ou tonturas durante um tratamento, interromper a aplicação e colocar um acolchoamento mais espesso sobre o tapete.
- As pessoas com pele sensível devem ser cuidadosas e colocar sempre uma toalha ou T-shirt no seu tapete, afim de evitar comichão.
- Pessoas que sofrem de problemas de coagulação, deve abster-se de utilizar o tapete a fim de evitar hemorragia e hematomas cutâneos.
- Pessoas com eczema alérgico grave nas costas ou psoríase geral deve exercer especial cuidados e usar sempre uma toalha. Inicialmente, recomendamos sessões de repouso mais curtas sobre o tapete gradualmente retomar e encontrar um equilíbrio.

Imagens do Artigo:

