

Finalidade: A utilização da almofada SIT AIR em cunha, combina a posição vertical desejada de uma cunha sentada com a dinâmica de uma almofada insuflável instável. Trata-se de uma cunha sentada dinâmica e multifuncional para utilização em reabilitação, em casa, no trabalho ou em qualquer lugar onde o utilizador deseje sentar-se anatomicamente forma correta e confortável. Não só faz só utilizador sentar-se em direito, como também ajuda a treinar o seu núcleo e a sua musculatura dorsal de uma forma quase impercetível.

Características: Materiais de alta qualidade e mão-de-obra sólida. A cobertura de malha promove a circulação de ar. Núcleo: espuma de poliuretano, cobertura: malha 100% poliéster, válvula ajustável

Medida: 35,5 x 35 x 5,5 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 120.060

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à somente à mão. Secar ao ar livre. Não usar secadores qualquer fonte de calor ou luz solar direta.

Instruções de Utilização:

Apoia a correção de muitas indicações médicas. Estas incluem o tratamento, alívio e prevenção de desequilíbrios musculares relacionados com a postura e dores nas costas, bem como equilíbrio formação. A densidade da espuma especial apresenta o equilíbrio certo entre o apoio e conforto.

Contraindicado para pacientes com condições ou queixas médicas inexplicáveis ou com fraturas instáveis do coluna vertebral ou pélvis, etc.

O corpo é movido sem esforço para um posição vertical com a pélvis ligeiramente inclinada para a frente. A válvula ajuda-o a ajustar o grau de desequilíbrio.

Imagens do Artigo:

