

Finalidade:

Almofada redonda com furo para sentar sem pressão na zona do cóccix, tratamento e prevenção de úlceras de pressão (antiescaras).

Características: Espuma de poliuretano; sem CFC; altamente estável; mantém a sua forma; hipoalérgico; resistente à chama.

Capa incluída de 100% algodão

Medida: Ø 45cm (externo); Ø 15cm (interno) 8 cm altura

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 121.017

Marca: SISSEL

Regulamento: (EU) 2017/745

Declaração de conformidade:
42506947V08039944

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Capa lavável com água fria e detergente delicado.
Não lavar a almofada. Não passar a ferro. Não
usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Utilização quando sofrer de pressão, especialmente após cirurgias do períneo, lesões anais, hemorroidas ou durante ou após a gravidez.

Contra indicações: Fraturas instáveis.

Imagens do Artigo: