

Finalidade: O aquecedor de pés serve para aquecer e proteger os pés com uma superfície extra macia.

Características: 3 Temperaturas: nível 1 - 53°C; Nível 2 - 59°C; Nível 3 - 65 ° C
Tolerância +/- 5 ° C.
Desligamento automático após 90min.
Potência: 100W
Voltagem: 220-240V
Material: 100% poliéster

Cor: Cinzento

Diretiva: CE 93/42

Classificação: EN 60335-1:2012 -

EN 60335-2-17:2013 -

EN 62233:2008)

Marca: Alpak (Moretti)

Modelo: LTK770

Dimensões: 30 x 30 x 24cm

Declaração de conformidade: Diretiva 2007/47

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos
Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar
Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Antes de limpar, certifique-se de que a Almofada de Aquecimento não está ligado à eletricidade e que está fria. Desligue sempre o cabo de alimentação antes de limpar. O forro do aquecedor de pés pode ser lavado. Retire o forro do aquecedor do pé e lave-o à mão (NÃO NA MÁQUINA DE LAVAR) a uma temperatura não superior a 30°C. Use um detergente neutro

- NÃO USE lixívia
- NÃO passe a ferro

Instruções de Utilização:

O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, a não ser que seja supervisionada por uma pessoa responsável pela sua segurança, supervisão ou depois de ter recebido instruções sobre a sua utilização.

Certifique-se que todas as peças estão bem ligadas antes de ligar.

- Insira a ficha na tomada e selecione a temperatura máxima por um curto período de tempo, para aquecer o aquecedor do pé mais rapidamente, em seguida, selecione um nível de temperatura de 1 a 3. (Nível 1 = temperatura mínima; Nível 2 = temperatura média; Nível 3 = temperatura máxima)
- Coloque os pés dentro do aquecedor do pé.

Imagens do Artigo:

