



MOPEDIA®

MA RS825-RS826-RS827-RS829-RS831-RS833-RS838-RS839-RS908-RP77001 B_10-2019

AJUDA À CASA DE BANHO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CÓDIGOS.....	p. 3
2. INTRODUÇÃO.....	p. 3
3. UTILIZAÇÃO.....	p. 3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE.....	p. 3
5. AVISOS GERAIS	p. 4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	p. 4
7. DESCRIÇÃO GERAL	p. 4
7.1 RS825-RS826.....	p. 5
7.2 RS827-RS829	p. 5
7.3 RS831-RS833.....	p. 5
7.4 RS838-RS839	p. 5
7.5 RS908	p. 5
7.6 RP770.....	p. 5
8. MONTAGEM	p.5
8.1 RS825-RS826.....	p. 5
8.2 RS827-RS829	p. 5
8.3 RS831-RS833.....	p. 5
8.4 RS838-RS839.....	p. 6
8.5 RS908	p. 6
8.6 RP770	p. 6
9. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO	p. 6
10. AVISOS PARA UTILIZAÇÃO.....	p. 6
11. FORMA DE UTILIZAÇÃO	p. 7
11.1 RS825-RS826	p. 7
11.2 RS827-RS829-RS831-RS833-RS838-RS839.....	p. 7
11.3 RS908	p. 7
11.4 RP770	p. 7
12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO.....	p. 7
12.1 Limpeza.....	p. 7
12.2 Desinfecção	p. 7
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	p. 7
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	p. 7
15. GARANTIA	p. 9
16. REPARAÇÕES.....	p. 9
16.1 Reparções em garantia.....	p. 9
16.2 Reparções de um produto não coberto pela garantia	p. 9
16.3 Produtos não defeituosos.....	p. 9
17. PEÇAS DE REPOSIÇÃO.....	p. 9
18. CLÁUSULAS EXONERADAS	p. 10

CE Dispositivo médico da classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46
 Aplicação da Diretiva 93/42 da CEE e alterações subsequentes

1. Códigos

RS825	Cadeira de banho dobrável com encosto e rodas
RS826	Cadeira de banho dobrável com encosto
RS827	Banco de banho sem encosto
RS829	Banco de banho com encosto
RS831	Banco de banho em "U" sem encosto
RS833	Banco de banho em "U" com encosto
RS838	Cadeira de banho com apoio de braços
RS839	Cadeira de banho com apoio de braços e encosto
RS908	Suporte de sanita removível e ajustável em altura
RP770	Suporte de estabilização ajustável em altura

2. Introdução

Obrigado por escolher uma cadeira de banho/chuveiro da linha MOPEDIA by Moretti. Os assentos de casa de banho/chuveiro Moretti foram projetados e fabricados para atender a todas as suas necessidades para uma utilização prática, correta e segura. Este manual contém pequenas dicas para o uso correto do dispositivo à da sua escolha e algumas dicas valiosas para a sua segurança. É aconselhável ler atentamente a totalidade deste manual antes de utilizar a cadeira. Em caso de dúvida, contacte o seu revendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

Nota: Verifique se todas as partes do produto não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter mais instruções.

Atenção!



- A uso do seguinte dispositivo para outras finalidades diferentes das definidas neste manual é expressamente proibido.
- Moretti S.P.A. declina qualquer responsabilidade por danos decorrentes do uso indevido do dispositivo ou de um uso diferente do indicado neste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, a fim de melhorar as suas características.

3. UTILIZAÇÃO

Os auxiliares de casa de banho/duche da linha MOPEDIA by Moretti destinam-se a facilitar o sentar de pessoas com deficiência ou pessoas com dificuldades de mobilidade durante as operações de limpeza na casa de banho.

4. Declaração de conformidade da CE

MORETTI S.P.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e colocados no mercado pela própria MORETTI S.p.A. e pertencentes à família BATH AIDS satisfazem as disposições aplicáveis da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.

Para este fim, la MORETTI S.p.A. Garantias declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

1. Estes dispositivos cumprem os requisitos essenciais do anexo I da

Diretiva 93/42/CEE, tal como prescrito no anexo VII.

2. A lista completa dos dispositivos em questão é indicada no anexo A da declaração.
3. Os dispositivos em questão **NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO**.
4. Os dispositivos em questão **NÃO SE DESTINAM A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA**.
5. Os dispositivos em questão são vendidos em embalagens **NÃO ESTÉREIS**.
6. Os dispositivos em questão devem ser considerados pertencentes à classe I.
7. **NÃO É PERMITIDO** utilizar e/ou instalar os dispositivos em questão fora do destino de utilização pretendido da MORETTI S.p.A.
8. MORETTI S.P.A. mantém e coloca à disposição das autoridades competentes a documentação técnica que comprova o cumprimento da Diretiva 93/42/CEE.

5. AVISOS GERAIS

- Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o seguinte manual.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor, uma vez que a embalagem é feita de cartão.
- A vida útil do aparelho é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e/ou substituíveis.
- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar lesões ou ferimentos pessoais nos membros.
- Preste sempre atenção à presença de crianças.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA



Código do produto



Identificador único do dispositivo



Marca CE



Fabricante



Lote de produção



Leia o Manual de Instruções



Dispositivo Médico



Condições de eliminação



Eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 RS825-RS826

Cadeira de banho com estrutura de alumínio pintado e assento HDPE, dobrável para reduzir o volume durante o armazenamento. Pontas de borracha antiderrapante (RS826) ou rodas (RS825), ajustáveis em altura.

7.2 RS827-RS829

Bancos de casa de banho com ou sem encosto, com estrutura anodizada de alumínio, assento e encosto (quando presente) em HDPE (polietileno de alta densidade). Altura ajustável para uma maior adaptabilidade. Pontas de borracha antiderrapante. Encosto fácil de desmontar (apenas RS829).

7.3 RS831-RS833

Bancos de duche com ou sem encosto, com estrutura de alumínio, assento e encosto em U (quando presente) em HDPE (polietileno de alta densidade). Altura ajustável para uma maior adaptabilidade. Pontas de borracha antiderrapante. Encosto fácil de desmontar (apenas RS833).

7.4 RS838-RS839

Bancos de casa de banho com apoios para os braços com ou sem encosto, com estrutura de alumínio, assento e encosto (quando existente) em HDPE. Altura ajustável para uma maior adaptabilidade. Pontas de borracha de ventosa.

7.5 RS908

Elevador de estabilização WC - Suporte para se levantar da sanita, estrutura ajustável em largura para uma maior adaptabilidade. Apoios de braço acolchoados para melhor conforto, pernas ajustáveis de altura, pontas antiderrapantes.

7.6 RP770

Elevador de sanita de estabilização ajustável - Pegas de segurança para sanitas. Fabricado em tubo de alumínio anodizado, com apoio de braço HDPE. Útil como um auxílio para se sentar e levantar da sanita. Adaptável a qualquer tipo de sanita. Pernas ajustáveis à altura, pontas de borracha antiderrapante.

8. MONTAGEM

8.1 RS825-RS826

1. Levante o assento.
2. Rode as duas partes laterais da frente.
3. Baixe a cadeira fixando-a nas guias das duas partes laterais.
4. Insira as 4 pernas (RS826) ou as rodas (RS825) nos tubos apropriados da estrutura.
5. Ajuste a altura.

8.2 RS827-RS829

1. Monte as 4 pernas nos respetivos suportes do assento.
2. Se necessário, rode os pés de borracha para ter uma superfície de suporte correta e ajuste a altura das pernas.
3. Monte os tubos curvos no encosto (RS829).
4. Junte o assento e o encosto (RS829).

8.3 RS831-RS833

1. Monte as 4 pernas nos respetivos suportes do assento.
2. Se necessário, rode os pés de borracha para ter uma superfície de suporte correta e ajuste a altura das pernas.

3. Monte os tubos curvos no encosto (RS833).
4. Junte o assento e o encosto (RS833).

8.4 RS838-RS839

1. Vire o assento.
2. Monte os arcos de suporte do assento e parafusos.
3. Insira as 4 pernas.
4. Insira os dois suportes de encosto (RS839).
5. Aparafuse o encosto nos seus suportes (RS839).
6. Insira os apoios para os braços.

8.5 RS908

1. Ligue os dois lados da estrutura com os tubos de ligação, utilize os grampos fornecidos para fixação. A armação é ajustável em largura, para ajustá-la deslize o tubo de ligação para a armação e fixe-a com o grampo na posição desejada.
2. Assim que a armação estiver completamente montada com os quatro grampos nos tubos de ligação, pode ajustar a altura da perna (ver como utilizar na secção 11.3).

8.6 RP770

1. Desaparafuse e levante o assento da sanita.
2. Insira as pernas na estrutura principal.
3. Ligue a estrutura com a placa de fixação à SANITA. 4
4. Coloque as pegas no mesmo ponto de fixação que a tampa da sanita.
5. Volte a colocar o assento e aparafuse.
6. Ajuste a altura das pernas. Pressione o trinco, retire o cano trazendo-o para a altura desejada. Solte o trinco, verifique a estabilidade do produto e que ambas as pernas estão na mesma altura.

9. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças de modo a garantir a utilização do aparelho em total segurança para pessoas e coisas.
- Verifique a montagem correta do aparelho.

10. Avisos para utilização

O fabricante e o distribuidor recusam qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes da utilização indevida do produto.

- Ajude sempre o paciente com dificuldades de locomoção para se posicionar no assento.
- Não utilizar com doentes que excedam o peso máximo indicado na etiqueta do produto colocada na estrutura do auxílio.
- Evite movimentos bruscos durante a colocação.
- Prestar atenção aos pisos molhados, húmidos ou escorregadios, pois podem dificultar o posicionamento do paciente.
- Não guarde o produto ao ar livre. Verifique periodicamente a estabilidade do produto e a correta fixação dos parafusos e o estado das proteções de borracha.
- Se tiver alguma dúvida sobre a utilização, regulação ou manutenção do produto, contacte o seu revendedor.



Atenção!

Não exceda a capacidade máxima permitida por nenhum motivo!

11. FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 RS825-RS826

Ajuste de altura

Retire os 4 grampos. Ajuste a altura das 4 pernas (RS826) ou rodas (RS825) conforme necessário. Reposicione os 4 grampos nos orifícios correspondentes para travar as pernas (RS826) ou as rodas (RS825) na altura escolhida. Certifique-se de que com o trinco entrou completamente no orifício.

11.2 RS827-RS829-RS831-RS833-RS838-RS839

Ajuste de altura

Pressione o trinco para ajustar o assento removendo o cano e trazendo-o para os orifícios de acordo com a altura desejada e a manobrabilidade subjetiva do paciente. Reposicione o trinco no orifício para trancar o cano. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura. Coloque o assento sobre uma superfície plana e regular. Verifique a estabilidade do assento antes de utilizar.

11.3 RS908

Pressione o trinco e leve-o até aos orifícios de acordo com a altura desejada. Reposicione o trinco no orifício para trancar o cano. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura.

11.4 RP770

Pressione o trinco e leve-o aos orifícios de acordo com a altura desejada. Reposicione o trinco no orifício para trancar o cano. Verifique se ambas as pernas têm a mesma altura.

12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

121 Limpeza

Para limpar o produto, utilize apenas um pano embebido em água e seque com um pano limpo seco, ou com água morna e sabão neutro. Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão e as superfícies metálicas enferrujadas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização de materiais que possam deteriorar a superfície do produto ou por corrosivos químicos utilizados durante a limpeza.

122 Desinfecção

Se necessário, desinfete o produto com um detergente desinfetante suave.

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de distribuição de resíduos sólidos urbanos. Em vez disso, recomenda-se a eliminação do dispositivo através das ilhas ecológicas comuns municipais para as operações de reciclagem planeadas dos materiais utilizados.

14. CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS RS825-RS826

*Tamanho:

 L: 53 cm  P: 54 cm  H: 90÷101 cm

Assento:

40 x 40 x h49÷60 cm

Altura do apoio de braços do assento: 15 cm

 Capacidade máxima:

136 kg
RS827

*Dimensões:

 L: 46 cm  P: 46 cm  H: 45÷64 cm

Sentado:

51 x 31 x Cm
 Caudal máximo:

h45÷64
136 kg
RS829

*Dimensões:

 L: 46 cm  P: 46 cm  H: 74÷93 cm

Sentados:

51 x 31 x
h45÷64
 Caudal máximo:

136 kg
RS831

*Dimensões:

 L: 45 cm  P: 45 cm  H: 41÷54 cm

Assento:

48 x 33 x h41÷54 cm
 Capacidade máxima:

136 kg
RS833

*Tamanho:

 L: 45 cm  P: 45 cm  H: 70÷83 cm

Assento:

48 x 33 x h41÷54 cm
 Capacidade máxima:

136 kg
RS838

*Tamanho:

 L: 46 cm  P: 40 cm  H: 47÷66 cm

Assento:

41 x 34 x h47÷66 cm
 Capacidade máxima:

136 kg
RS839

*Tamanho:

 L: 46 cm  P: 40 cm  H: 80÷99 cm

Assento:

41 x 34 x h47÷66 cm
 Capacidade máxima:

136 kg
RS908

*Dimensões:

 L: 62÷71 cm  P: 50 cm  H: 66÷77 cm

 Capacidade máxima:

136 kg
RP770

* Tamanho:

 L: 54÷63 cm  P: 47 cm  H: 66÷77 cm

 Capacidade máxima: 136 kg

* As medições referem-se ao tamanho médio da pegada

15. Garantia

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, e abuso ou modificação do produto e por não adesão às instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual de instruções.

A Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada ou relacionada com a instalação e/ou utilização do equipamento que não cumpra escrupulosamente as instruções dos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação (quando fornecidos), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não adesão às orientações e instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou falha na manutenção, conforme indicado no manual.

Os componentes consumíveis não são cobertos por esta garantia se os danos forem imputáveis à utilização normal do produto.

16. Reparações

16.1 Reparação de garantia

No caso de um produto Moretti ter defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, poderá substituir ou reparar o artigo de garantia, num revendedor específico da Moretti ou na sua sede. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se se determinar que a reparação se enquadra no âmbito da garantia. Uma reparação ou substituição não renova ou prolonga a garantia.

16.2 Reparação de um produto não coberto pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações em produtos não abrangidos pela garantia são garantidas por 6 (seis) meses, a partir do dia em que recebe o produto reparado.

16.3 Produtos não defeituosos

O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio devidos à devolução serão suportados por ele.

17. Peças sobressalentes

Para peças sobressalentes e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral da Moretti. As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe a peça sobressalente.

18. CLÁUSULAS EXONERADAS

A menos que quanto expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um final

particular não violação e não Interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupto ou sem erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitações sobre a duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais relacionados a produtos de consumo. Em tais estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si.

Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em data _____

Revendedor _____

Via _____ Localidade _____

Vendido para _____

Via _____ Localidade _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www. .come-mail .com morettispa:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com