

ARTIGO REABILITAÇÃO, BEM ESTAR E CONFORTO

Finalidade:

A almofada de apoio de joelho Sissel Medi é uma almofada de apoio suave para as suas pernas. Tornará a colocação na posição lateral mais confortável e agradável. O Sissel Medi Support tem uma camada viscoelástica de Temp-Control, que oferece uma distribuição uniforme da pressão, com uma intensidade de apoio ou correção ligeiramente reduzida. Esta é a almofada ideal para reduzir a pressão nas articulações do joelho e manter a pélvis quadrada quando deitada na posição lateral.

Características: Enchimento 80% algodão e 20 % poliéster. Este travesseiro de apoio é fácil de ajustar com os fechos de velcro.

Medida: 17 x 20 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 170.060

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio
Maior - 2040-357 RIO MAIOR

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A capa do travesseiro é lavável à máquina.

Instruções de Utilização:

A almofada de apoio de joelho Sissel Medi oferece conforto quando dorme e deita-se na posição lateral. O homem sente-se deitado na posição lateral geralmente desconfortável, pois uma perna está deitada na parte superior da outra, fazendo com que os joelhos se toquem uns aos outros e batam uns contra os outros. A almofada de Apoio Médio encaixa suavemente entre as pernas, evita que os joelhos se toquem uns aos outros e assegura uma boa postura direita do corpo.

- Reduz a pressão sobre as articulações do joelho;
- Ao colocar em posição lateral ajuda a manter a pélvis quadrada;
- Reduz a torção da pélvis e mantém a coluna vertebral direita;
- Reduz a transpiração devido à fácil postura de postura;

Imagens do Artigo: