

Finalidade: Ideal para pessoas que não conseguem andar ou com mobilidade reduzida. Cadeira de rodas manual para transporte ou transferência. Ideal para viagens curtas.

Características: Possui uma estrutura em alumínio leve e robusta. É facilmente transportável e vem com uma bolsa de transporte. Apoio de braços almofadados e rebatíveis. Apoios para os pés ajustáveis em altura. Esta cadeira de rodas de transferência dobra até um tamanho de cerca de 1/3 do tamanho de uma cadeira de rodas normal.

Peso: 10 Kg.

Peso máximo autorizado (resistência): 115 Kg.

Dimensões totais: largura. 57 x profundidade 84 x altura 95cm.

Dimensões do assento: largura 45 x profundidade 45 x altura 48cm.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 825009

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: A estrutura de alumínio do Travelite e os estofos de nylon podem ser limpos com um pano húmido e detergente ou desinfetante suave. Se o Travelite for sujeito a humidade, deve ser imediatamente seco. O Travelite deve ser verificado mensalmente quanto à integridade do dispositivo. Quaisquer fechos soltos devem ser apertados ou substituídos, e quaisquer estofos rasgados ou desgastados ou peças substituídas. O Travelite vem com pneus sólidos que não necessitam de ser inflados.

Instruções de utilização: Dobre completamente o assento, empurrando para baixo nos quatro cantos do assento. Assegure-se de que o assento está totalmente dobrado para fora, caso contrário, os apoios de braços podem não se localizar corretamente. Para a sua montagem, consulte o manual de instruções que acompanha o artigo.

Imagens do Artigo:

