

Finalidade: Assento giratório com base anti-deslizante para ajudar pessoas com dificuldade a movimentar as pernas, a sair do carro, da cama ou da cadeira.

Características:

Assento almofadado. Parte superior: 100% algodão; Interior: 100% poliéster; Base: antiderrapante. Gira sobre apoio interior rígido reduzindo o esforço por parte do utilizador.

Diametro: 44cm

Dimensões: 44X44X4 cm

Cor: Azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: ST340

Marca: Opera

Declaração de Conformidade: Diretiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Para armazenar guarde o saco seque longe de fontes de calor e no seu interior com um pouco de pó talco. A limpeza deve ser realizada com água morna e um detergente neutro. Deixe secar naturalmente, não exponha a luz solar direta ou outras fontes de calor. Não utilize produtos alcalinos, ácidos ou solventes para desinfetar.

Instruções de Utilização:

Antes da Utilização, verifique o estado de desgaste das peças de modo a garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e coisas

Evite deixar o aparelho em contacto com a água durante longos períodos de tempo.

- Em caso de dúvidas sobre a utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor.
- Para evitar riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance das criança

Imagens do Artigo:

