SCOOTER TRAVELLER PLUS 824044



Finalidade:

A scooter Traveler Plus é uma pequena scooter que se adapta em todo o lado. Pode ser desmontado sem ferramentas em 4 partes para facilitar transporte num porta-bagagens de automóvel. Está equipado com um confortável assento, que pode ser rodado 360° e tem apoios de braços. Sistema de desacoplamento de roda livre. Inclinação ajustável do guiador. Muito confortável graças às suas suspensões dianteira e traseira

Características:

Motor de 220W. Velocidade máxima 6,6 Km/h.

O TRAVELER PLUS utiliza duas baterias de 20Amp, 12V AMP

O carregador de bateria é um carregador de 6 amperes com interruptor externo

Autonomia 25 kms

Velocidade máxima: 6,5Km/H

Peso: 56kg.

Peso máximo suportado: 136 kg

Peso dos principais componentes :Chassis dianteiro: 20,5 kg - Chassis traseiro: 13,5 kg - Bateria (unidade): 10,5 kg -

Assento 13 kg

Dimensões: Comprimento 113 x largura 57 x altura 94 cm.

Cor: 2 cores disponíveis: branco e laranja.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação: Dispositivo médico de classe 1

Declaração de conformidade:

Modelo: 824044 - Branco e Laranja

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain

d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR $\,$ -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

As capas e assento das scooters devem ser limpos com um pano húmido e detergente suave. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou solventes, uma vez que isto irá danificar os componentes plásticos. Não pulverizar água (mangueira ou limpador de alta pressão) sobre a scooter, pois isto pode danificar a eletrónica. A sua scooter deve ser armazenada num local seco, de preferência numa garagem ou num barracão. As lonas e coberturas podem criar condensação em certas condições meteorológicas. Se a sua scooter tiver de ser armazenada por longos períodos, carregue totalmente as baterias e desligue as fichas das baterias. O tempo muito frio pode drenar seriamente a bateria (até 40%). Se a scooter for deixada estacionada em tempo frio, é muito importante que a scooter seja totalmente carregada antes de ser utilizada.

Instruções de utilização:

Antes de utilizar a sua scooter, é necessário encaixar o guiador e a haste do assento. Para caber na barra do manípulo, é necessário o botão e a mola. Montar a pega do guiador pela dobradiça do lado direito. Colocar a mola sobre o parafuso. Alinhar as duas juntas das dobradiças e colocar os fios do botão no lado direito da dobradiça. Ajustar o guiador para o ângulo desejado e apertar completamente o botão. Nota: Para informação completa de montagem e utilização, consulte o manual de instruções que acompanha o produto.

Imagens do Artigo:





