

**Finalidade:**

Almofada com enchimento para fornecer calor, permite uma sensação de relaxamento e bem-estar para aliviar as dores musculares e caibras dos mais pequenos. Ajuda e acalma as crianças na hora de adormecer e pode ser usado para tratamentos de calor. As crianças adoram abraçar estes amiguinhos e desfrutar do calor agradável.

**Características:**

Composição da almofada/forma de animal: 73% Polyester e 27%Algodão

Composição do enchimento (interior da almofada): Carços de cereja, Grainha de uva, Perolas de silicone, grânulos de cerâmica e sementes de colza.

**Dimensões:** 34 x 20 cm

**Cor:** Verde

**Modelo:** 861215 – Cão

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Classificação:**

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

- Guardar em local seco
- Evitar exposição solar direta
- Não lavar o enchimento, se necessário limpar com um pano húmido.
- Se tiver capa, pode ser lavada de acordo com as instruções na etiqueta.
- Por razões de higiene o artigo deve ser substituído após 3 anos da data de compra.

**Instruções de utilização:** O artigo pode sofrer danos por sobreaquecimento. Não utilizar se danificado. Aquecer no micro-ondas sempre com um copo de água meio cheio. Se o artigo tiver uma capa, deve ser removida antes do aquecimento. Não aquecer o artigo na função grill ou dentro de um recipiente com água. Nunca colocar um objeto de metal durante o aquecimento.

1-Distenda o artigo de forma plana no micro-ondas, e o enchimento de forma uniforme.

2-Utilize o micro-ondas de acordo com as instruções na etiqueta do produto.

3-Depois de aquecer, manuseie o artigo para uniformizar a temperatura.

4-Teste a temperatura no seu antebraço

5-Se a temperatura não for suficiente, repita os passos 1 a 4

6-Se a temperatura estiver muito quente, arrefeça á temperatura ambiente e verifique se existem danos

7-Não utilizar mais de 20 minutos no mesmo ponto do seu corpo.

**Imagens do Artigo:**