

Finalidade: Dispositivo de medição de pressão arterial sistólica e diastólica;

Características: Totalmente automático, este monitor de braço mede a sua tensão arterial a sua tensão arterial e apresenta-a no grande ecrã LCD. LCD SCREEN. Método oscilométrico. Vem com punho ajustável de 22 a 36 cm. 2 memórias com 60 leituras cada. Parar paragem automática.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e branco

Data de produção: Ver embalagem

Caixa: 1

Diretiva: CE 93/42

Classificação:

Modelo: BF3212 - REF 861184

Marca: Identités

Dimensões: 13,8 x 11 x 6,8 cm

Certificado CE:

Fabricante: Shenzhen Pump Medical System Co.

Morada do fabricante: 2/F, M-7 Sinosteel Building, Maqueling Estate, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 518057 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Mandatário Europeu: Identités

Morada do Mandatário Europeu: ZA Pole 42 - Rue de la Forgerie 49480 St Sylvain d'Anjou Telefone, telefone. 02 41 96 18 48

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 204-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Não exponha a unidade principal e a pulseira a temperaturas extremas, humidade ou luz solar direta. Não desmonte o aparelho. Não sujeitar a unidade a choques ou vibrações excessivas (por exemplo, derrubando o aparelho no chão.) Não utilize líquidos voláteis para limpar a unidade principal. Utilize um pano macio e húmido com sabão para limpar a pulseira.

Instruções de Utilização: Não coma, beba álcool, fume, tome banho, faça exercício pelo menos 30 minutos antes de tomar a pressão arterial. Além disso, não tome nenhuma medicação que possa aumentar a pressão arterial. Não tente tomar a pressão arterial quando estiver nervoso, perturbado ou ansioso, isso pode aumentar os resultados. Relaxe cerca de 5 a 10 minutos antes da medição. Sente-se confortavelmente, respire livremente e calmamente, não ande. A braçadeira deve tirar cerca de 3/4 do seu braço. Encaixa-se facilmente com o velcro.

Imagens do Artigo:

