

Finalidade: As Bengalas são concebidas para lhe permitir equilibrar o seu peso ou retirar a carga dos membros inferiores ao andar. Indicado para os utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança. Permitem uma marcha segura e confortável de caminhar graças à sua robusta estrutura de alumínio. A pega foi concebida para todos os tamanhos de mãos, melhorando o conforto.

Indicações: Perda de autonomia devido a distúrbios; Distúrbios de equilíbrio e/ou postura; Problemas de marcha; Programa de reabilitação após uma lesão ou operação.

Características: Estrutura de alumínio e Propileno. Anel de aperto anti-ruído para maior conforto. Punho confortável de toque macio para fácil manuseamento. Cabo imitação de resina de madeira. Ajuste com botão de pressão. Carga Máxima: 110Kg. Peso: 360gr.

Dimensões:

Altura ajustável de 74,5 a 97,5 cm.

Diâmetro: 17mm

Diâmetro interior - Ponta: 18mm

Diâmetro – Base: 40mm

Cor: Branco e Preto, Cabo Castanho

Modelo: 816073.B

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

A bengala deve de ser limpa regularmente com um produto suave de limpeza e um pano macio. Nunca utilizar produtos oleosos, corre o risco de escorregar. As borrachas devem ser verificadas e mudadas regularmente.

Instruções de utilização:

Retire a bengala do seu saco de plástico. Uma vez fora, ajuste a altura, solte o anel de aperto. Pressione o botão de bloqueio situado na parte inferior do tubo telescópico e deslize até ao próximo orifício. Aperte o anel de bloqueio e solte o botão para bloquear. A bengala está pronta a ser utilizada.

Imagens do Artigo:



Ajuste com botão de pressão Grampo anti-ruído Punho de toque suave