

Finalidade: As Bengalas Dobráveis e Ajustáveis são concebidas para lhe permitir equilibrar o seu peso ou retirar a carga dos membros inferiores ao andar. Indicado para os utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança. Permitem uma marcha segura e confortável de caminhar graças à sua robusta estrutura de alumínio. A pega foi concebida para todos os tamanhos de mãos, melhorando o conforto.

Indicações: Perda de autonomia devido a distúrbios; Distúrbios de equilíbrio e/ou postura; Problemas de marcha; Programa de reabilitação após uma lesão ou operação.

Características: Estrutura de alumínio e Propileno. Anel de aperto anti-ruído para maior conforto. Punho confortável de toque macio para fácil manuseamento. Cabo imitação de resina de madeira. Ajuste com botão de pressão. Carga Máxima: 110Kg. Peso: 360gr.

Dimensões:

Altura Bengala Dobrável Ajustável de 82,5 a 92 cm.

Altura Dobrada: 31cm

Comprimento do cabo: 14cm

Diâmetro: 17mm

Diâmetro interior - Ponta: 18mm

Diâmetro – Base: 40mm

Cor: Pastel, Cabo Castanho

Modelo: 816074.P

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterrie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

A bengala deve de ser limpa regularmente com um produto suave de limpeza e um pano macio. Nunca utilizar produtos oleosos, corre o risco de escorregar. As borrachas devem ser verificadas e mudadas regularmente.

Instruções de utilização:

Retire a bengala do seu saco de plástico. Uma vez fora, ajuste a altura, solte o anel de bloqueio. Pressione o botão de bloqueio situado na parte inferior do tubo telescópico e deslize até ao próximo orifício. Aperte o anel de bloqueio. A bengala dobrável tem um orifício para montagem no tubo externo e 5 furos no tubo interno, permite até 5 configurações. Pode ser ajustado a cada 2 cm. A bengala é dobrável em 4 partes. Antes de usar, assegure-se sempre de que o anel de bloqueio está firmemente seguro no lugar e, que o botão de bloqueio está totalmente encaixado no orifício selecionado. Para desdobrar, solte um tubo de cada vez, e encaixe-os até todos ficarem conectados entre si. Verifique que todos estão no lugar. Para dobrar, puxe dois tubos para baixo e dobre um no outro. Repita a operação com os restantes.

Imagens do Artigo:



Ajuste com botão de pressão Grampo anti-ruído Punho de toque suave