



TASMANIA MESA DE CABECEIRA COMPACTA - 823025 MANUAL DE INSTRUÇÕES

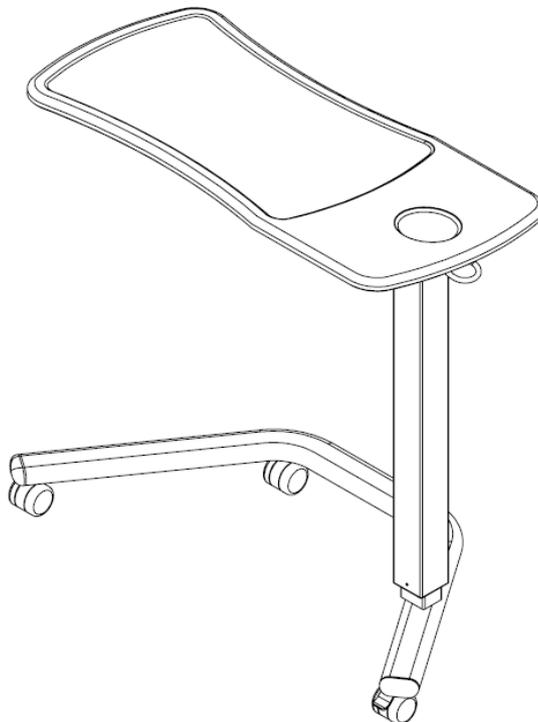

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO :

Por favor leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar a mesa de cama Compacto da Tasmânia.

1. Utilizar a mesa de cama apenas como descrito neste manual.
2. Instalar a mesa de cama sobre uma superfície plana.
3. Armazenar a mesa de cabeceira num ambiente interior, livre de bolor e pó. Não armazenar numa garagem, adega, telheiro exterior ou qualquer outro lugar que possa estar exposto à humidade.
4. Esta mesa de cabeceira utiliza um cilindro pneumático de alta pressão para ajustar a altura do tampo da mesa. Não retirar o pino de bloqueio da montagem da coluna antes da sua utilização.
5. Antes da utilização, assegurar-se de que todas as peças estão presentes e em bom estado. Em caso de danos, por favor contacte o seu revendedor.
6. Seguir cuidadosamente as instruções de montagem e assegurar-se de que todos os componentes são devidamente fixados antes de serem utilizados.

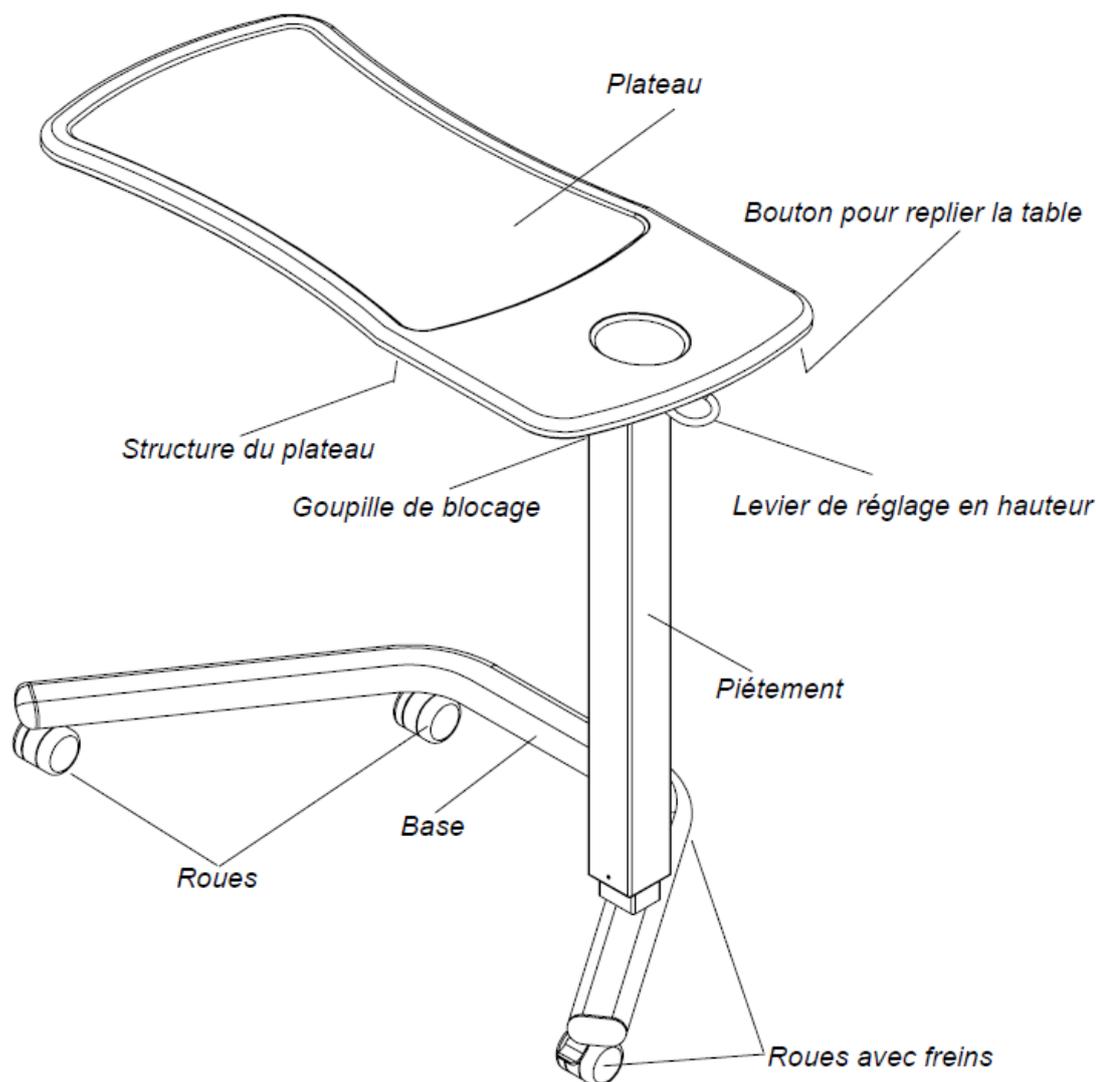


Dimensões totais em cm: C 82 x L 45 x A 79 a 115 cm

Altura ajustável de 78 a 105 cm

Peso total 13,5 kg

INSTALAÇÃO

Colocar a mesa de cama sobre uma superfície clara e retirar a embalagem. Não descartar a embalagem até que a montagem esteja completa.

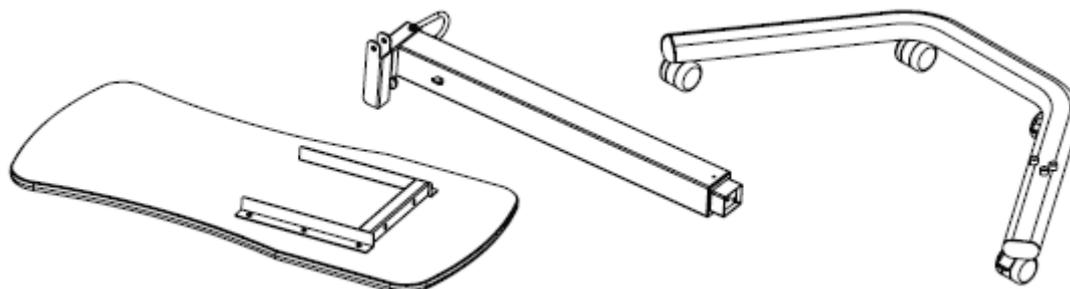

IDENTITES



Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 – 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - www.identites.eu

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

PASSO 1


Colocar a mesa de cabeça para baixo sobre uma superfície plana, como mostra a direita.

Inserir a base na armação superior da mesa, alinhando os furos dos parafusos como se mostra à direita. Inserir os parafusos sextavados através da base na armação superior da mesa. Utilizar a chave hexagonal M8 para apertar os parafusos.

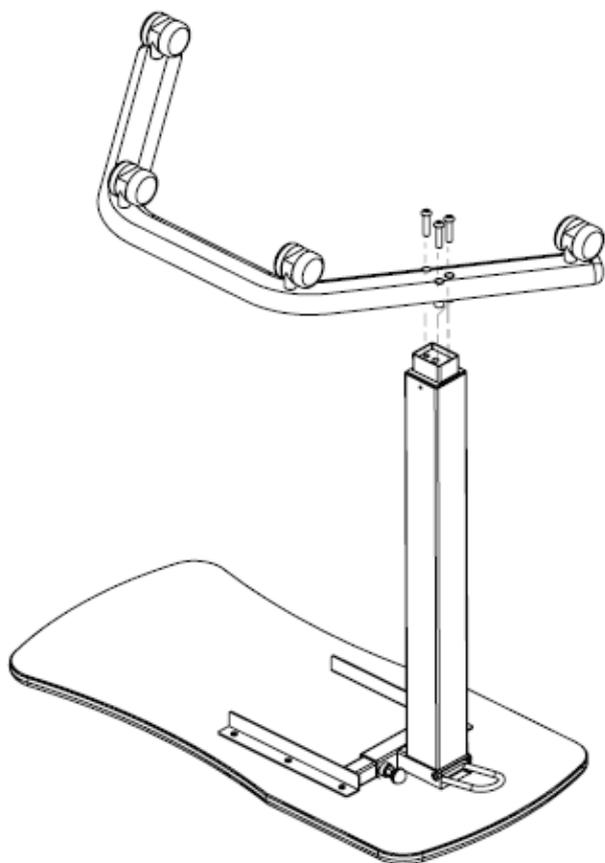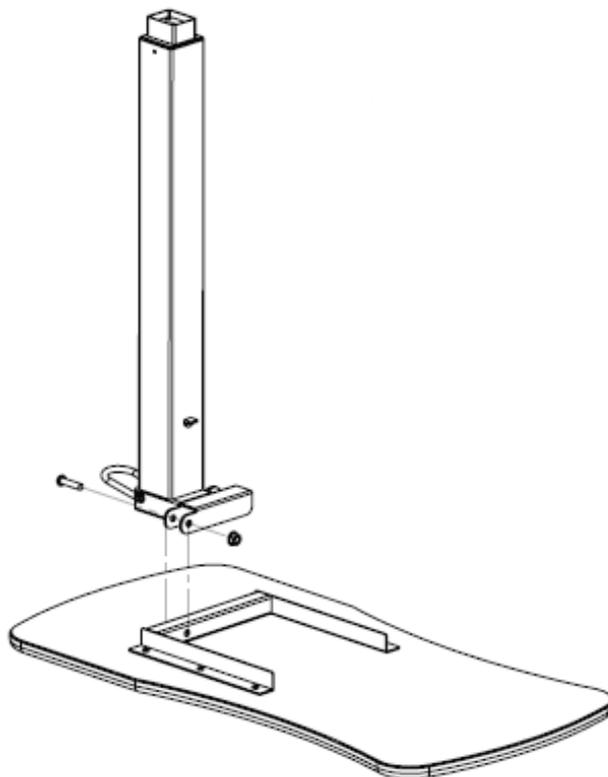

PASSO 2

Colocar a base de cabeça para baixo sobre a base, como mostra a esquerda. Aparafusar os 3 parafusos através da base.

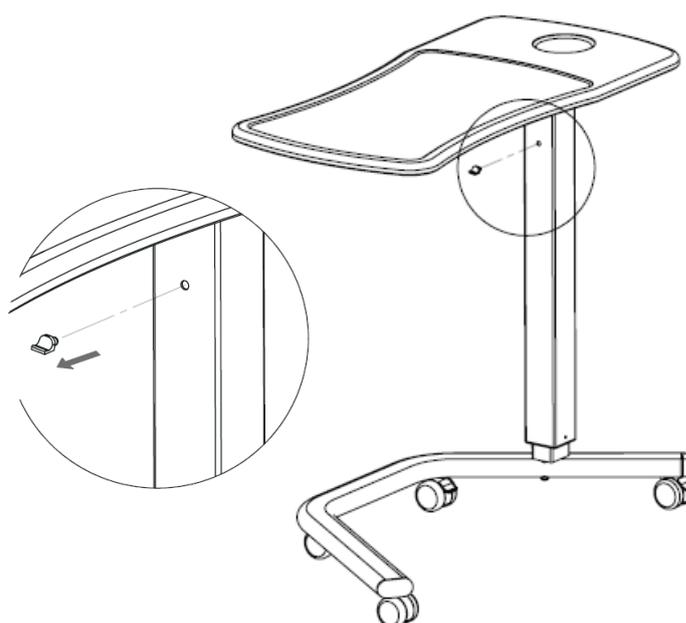

PASSO 3

Vire a mesa e coloque-a no chão. Certifique-se de que todas as peças estão apertadas antes de utilizar a mesa de cabeceira.

Retirar o pino de bloqueio da base.

IDENTITES


Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 – 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - www.identites.eu

Fabriqué en Chine Importé par : ADYS – 330, allée des Hêtres – 69760 Limonest

AJUSTAR A ALTURA

Para levantar a mesa, puxar o tampo da mesa para cima.

Para baixar a mesa, puxar a alavanca como se mostra em frente e pressionar a mesa em cima para baixo.

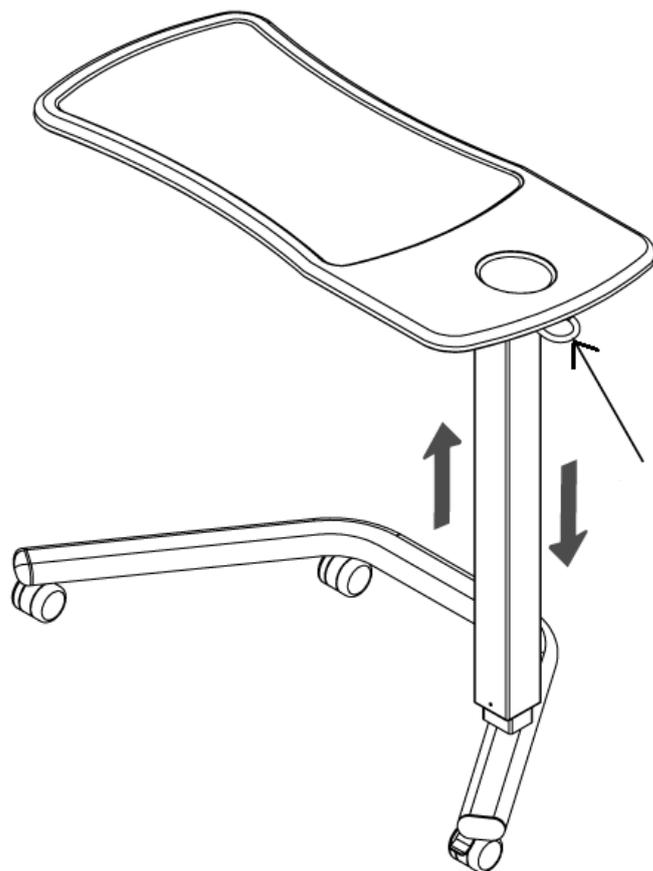


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar com um detergente neutro e um pano macio. Não utilizar ácidos ou solventes.

DOBRÁVEL PARA ARMAZENAMENTO

1. Puxar o botão debaixo do tampo da mesa para permitir que a mesa se incline
2. Empurrar o tampo da mesa para o ângulo desejado

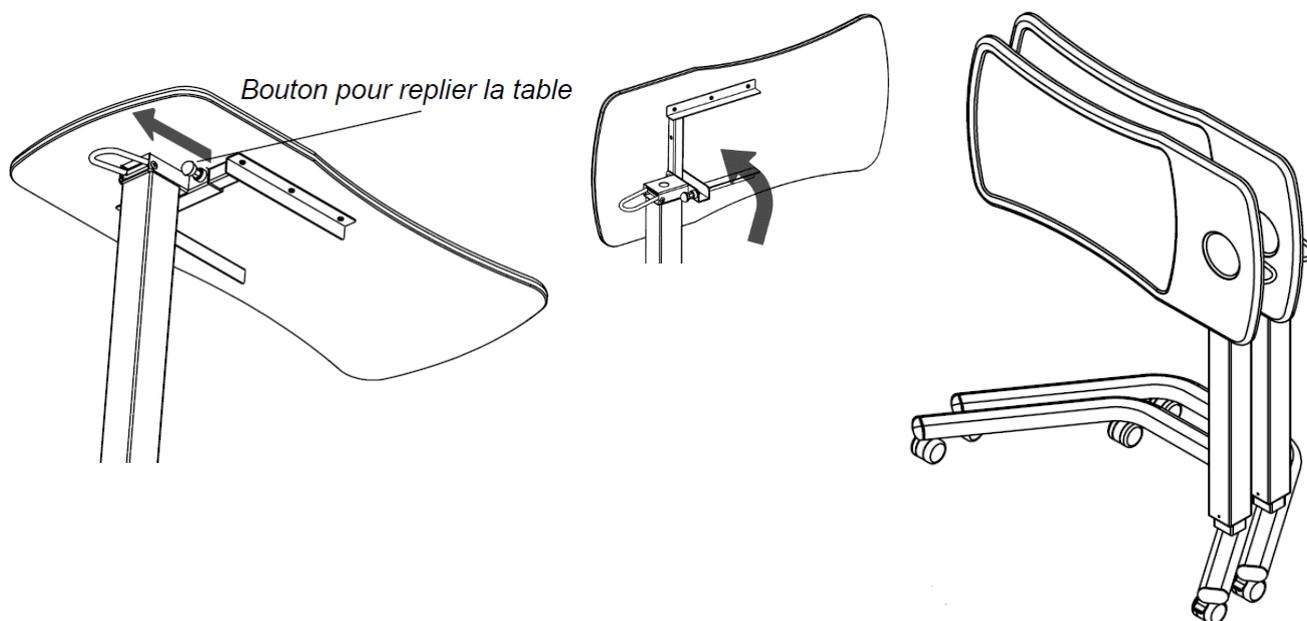

IDENTITES